

Curera® Abduktionskudde

Kudde för abduktion av ben



 **curera**[™]
positionering

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

Curera® Abduktionskudde

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning.

De är också till hjälp vid omläggning och skötsel. Till kuddarna och rullarna finns även våra hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör.



Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att vårdtagaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Curera® Abduktionskudde är utformad för att abducera benen och stödja kroppshållningen i de nedre extremiteterna i liggande läge för vårdtagare med nedsatt förmåga att röra sig eller lägesändra.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.



EXEMPEL PÅ POSITIONERING

RENGÖRING	FAKTA
<p>Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.</p> <p>Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger.</p> <p>Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fyllning: 50 % HR-skum/50 % polyesterfiber• Garanti: 1 år• Storlekar: 35 x 55 cm och 54 x 78 cm• Tillbehör: Hygienöverdrag: Polyuretan/polyester Bomullsöverdrag <p>  Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-06-03.