

Bruksanvisning

2019-09-30

Curera® Positionering

Avser produkterna:

- Curera® Rektangulär kudde
- Curera® Positioneringsrulle
- Curera® Ryggstöds kudde
- Curera® Nackkudde
- Curera® Multikudde
- Curera® Bålstöds kudde
- Curera® Abduktionskudde
- Curera® Böjd kudde
- Curera® Trekantskudde
- Curera® Stödkil
- Curera® Öronkudde
- Curera® S-Formad kudde

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001005



7 331345 011912



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Rengöring	7
Övrig information	7
Egna noteringar	11

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. Var särskilt uppmärksam där sänggrindar används. Undvik skador från vassa föremål som kan påverka hygienskyddets funktion.
4. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
5. Undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med hygienöverdraget, ångpermeabiliteten kan påverkas.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna produkt är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42 EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

Produkterna uppfyller tillämpliga delar i kraven för följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 04, SS 876 00 02, SS-EN-ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1, EN 14126.

1.2 Avsedd användning

Curera® Positionering är en serie kuddar och kilar som används för att avlasta och positionera brukare i alla typer av vårdmiljöer. Sortimentet är brett och täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. Lägesändring behövs alltid, även när man använder sig av Curera® Positionering.

1.3 Produktbeskrivning

Positionering handlar om att det ska vara bekvämt för brukaren, det är därför viktigt att alltid fråga vad brukaren tycker. De är enkla att använda och det finns flera olika användningsområden för kuddarna. Curera® Positionering finns i flera olika storlekar och former.

Information gällande användning

- Använd Curera® Positionering så att ingen översträckning sker eller att kontrakturer uppstår.
- Positionering kan ske utifrån diagnos och ska beaktas med hänsyn till eventuella kontraindikationer.
- Vi rekommenderar att lägesändringar sker regelbundet.
- Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal utifrån diagnos, status och allmäntillstånd.
- För känslan och komfortens skull rekommenderar vi att inte hygienskyddet läggs direkt mot huden.

1.3.1 Curera positioneringskuddar

Dessa produkter är tillverkade i ett slitstarkt tyg, tvättbara i maskin.

- Positioneringsrullen finns i storlekarna 15x60, 20x80, 20x125, 20x225 cm
- Rektangulär kudde finns i storlekarna 25x80, 40x70, 50x60, 50x85, 50x100 cm
- Multikudden finns i storlekarna 45x45, 60x70 cm
- Nackkudden finns i storlekarna Ø32, Ø38, Ø50 cm
- Ryggstödsudden finns i storleken 50x85 cm
- Bålstödsudden finns i storleken 47x28x28 cm
- Trekantskudden finns i storlekarna 47x28x28, 62x35x35 cm
- Böjd kudde finns i storlekarna 75x40x25, 110x75x40, 120x75x30 cm
- Abduktionskudden finns i storlekarna 35x55, 54x78 cm
- Öronkudde finns i storleken 32x32 cm
- S-Formad kudde finns i storlekar 200x38, 170x28 cm

Fyllning: 50 % skum, 50 % polyesterfibrer

Garanti: 1 år



Exempel, Curera Rektangulär kudde 25x80 cm

1.3.2 Curera Stödkil


Storlek: 70x26x15/5 cm, 50x26x15/5 cm

Fyllning: 100 % kallsaum


Garanti: 1 år

Exempel på användningsområde där Stödkilarna placeras olika beroende på vilken madrass som används.


Madrass upp till 15 cm höjd:
två stödkilar placeras under madrassen.

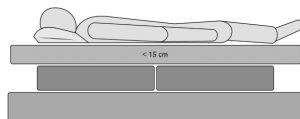

Vid bäddmadrass:
två stödkilar placeras mellan bäddmadrassen och underliggande madrass.

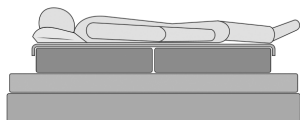

Ersättningsmadrass över 15 cm höjd:
två stödkilar placeras mellan lakanet och madrassen.

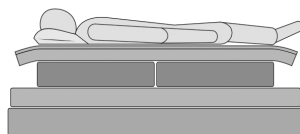

1.4 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madraguiden

Denna guide ger dig som personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

Handbok för Curera Positionering

Denna handbok ger dig fördjupad användarinformation. Finns för nedladdning på www.careofsweden.se.

1.5 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

2 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

2.1 INNERKUDDE



Undvik övertorkning vid torktumling/torkskåp. För snabbare torkning, kör centrifugering 3-4 gånger.

2.2 HYGIENÖVERDRAG (tillbehör)



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten. Vid behov används ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom alkohol med/utan tensider, oxiderande lösningar, klor 1 % eller Isopropanol 70 %.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



2.3 BOMULLSÖVERDRAG (tillbehör)



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

Viktigt!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut.

3 Övrig information

3.1 Förvaring

Förvaring bör ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara produkten så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller liknande. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.

3.2 Märkning

Produkten är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer. Även ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn).

3.3 Garanti

Dessa produkter omfattas av 1 års garanti. Garantin gäller ej normal förlitning eller försämring av produkten eller skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering/skötsel.

3.4 Service och underhåll

Produkten kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

3.5 Livslängd

Beräknad livslängd för dessa produkter är 2 år.

3.6 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och ska källsorteras som 'brännbart avfall'. Ingen demontering är nödvändig.

3.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

3.8 Tillval och tillbehör

Beskrivning	Art. Nr.
Hygienöverdrag - Curera® Abduktionskudde 35x55 cm	14-001119
Hygienöverdrag - Curera® Abduktionskudde 54x78 cm	14-001120
Hygienöverdrag - Curera® Multikudde 45x45 cm	14-001131
Hygienöverdrag - Curera® Multikudde 60x70 cm	14-001130
Hygienöverdrag - Curera® Nackkudde Ø32 cm	14-001126
Hygienöverdrag - Curera® Nackkudde Ø38 cm	14-001114
Hygienöverdrag - Curera® Nackkudde Ø50 cm	14-001125
Hygienöverdrag - Curera® S-Formad kudde 170x28 cm	14-001260
Hygienöverdrag - Curera® S-Formad kudde 200x38 cm	14-001261
Hygienöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 25x80 cm	14-001110
Hygienöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 40x70 cm	14-001113
Hygienöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 50x60 cm	14-001111
Hygienöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 50x85 cm	14-001112
Hygienöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 50x100 cm	14-001115
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 15x60 cm	14-001137
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x80 cm	14-001145
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x125 cm	14-001136
Hygienöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x225 cm	14-001135

Hygienöverdrag - Curera® Bålstöds kudde 85x65x30 cm	14-001116
Hygienöverdrag - Curera® Trekants kudde 47x28x28 cm	14-001117
Hygienöverdrag - Curera® Trekants kudde 62x35x35 cm	14-001118
Hygienöverdrag - Curera® Böjd kudde 75x40x25 cm	14-001412
Hygienöverdrag - Curera® Böjd kudde 110x75x40 cm	14-001411
Hygienöverdrag - Curera® Böjd kudde 120x75x30 cm	14-001410
Hygienöverdrag - Curera® Stödkil 50x26x15/5 cm	51-100004
Hygienöverdrag - Curera® Stödkil 70x26x15/5 cm	51-100002

Beskrivning

Beskrivning	Art. Nr.
Bomullsöverdrag - Curera® Abduktions kudde 35x45 cm	14-001119B
Bomullsöverdrag - Curera® Abduktions kudde 54x78 cm	14-001120B
Bomullsöverdrag - Curera® Multikudde 45x45 cm	14-001131B
Bomullsöverdrag - Curera® Multikudde 60x70 cm	14-001130B
Bomullsöverdrag - Curera® Nackkudde Ø32 cm	14-001126B
Bomullsöverdrag - Curera® Nackkudde Ø38 cm	14-001114B
Bomullsöverdrag - Curera® Nackkudde Ø50 cm	14-001125B
Bomullsöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 25x80 cm	14-001110B
Bomullsöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 40x70 cm	14-001113B
Bomullsöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 50x60 cm	14-001111B
Bomullsöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 50x85 cm	14-001112B
Bomullsöverdrag - Curera® Rektangulär kudde 50x100 cm	14-001115B
Bomullsöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 15x60 cm	14-001137B
Bomullsöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x80 cm	14-001145B
Bomullsöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x125 cm	14-001136B
Bomullsöverdrag - Curera® Positioneringsrulle 20x225 cm	14-001135B
Bomullsöverdrag - Curera® Bålstöds kudde 85x65x30 cm	14-001116B
Bomullsöverdrag - Curera® Trekants kudde 47x28x28 cm	14-001117B
Bomullsöverdrag - Curera® Trekants kudde 62x35x35 cm	14-001118B
Bomullsöverdrag - Curera® Böjd kudde 75x40x25 cm	14-001412B
Bomullsöverdrag - Curera® Böjd kudde 110x75x40 cm	14-001411B
Bomullsöverdrag - Curera® Böjd kudde 120x75x30 cm	14-001410B
Bomullsöverdrag - Curera® Stödkil 50x26x15/5 cm	51-100004B
Bomullsöverdrag - Curera® Stödkil 70x26x15/5 cm	51-100002B
Bomullsöverdrag - Curera® S-Formad kudde 200x38 cm	14-001146B
Bomullsöverdrag - Curera® S-Formad kudde 170x28 cm	14-001147B
Bomullsöverdrag - Curera® Öronkudde 32x32 cm	14-001144B

3.9 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Ej torktumlning



Torktumlning



Droptorkning



Ej kemtvätt



Ej strykning



Strykning med mellan
temperatur (Max 150 °C)



Avtorkning



Klor



Ej vattentvätt



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB

Box 146

514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A

514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A

514 33 Tranemo