

Bruksanvisning
2014-12-04

Curera® Sittdyna

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001006



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	3
Produktbeskrivning och prestanda	4
Handhavande	5
Rengöring	6
Övrig information	6
Tillbehör	8

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Curera® Sittdyna är ett hjälpmedel och kräver som alla hjälpmedel daglig kontroll och inspektion.
2. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Care of Sweden.
3. Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
4. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad.
5. Om dynan har utsatts för höga temperaturer, exempelvis förvarats i direkt solsken, skall man före användning kontrollera så att den inte är för varm att sitta på.
6. Kontrollera alltid att dynan har avsedd storlek.
7. Före användning skall dynan alltid kontrolleras så att den inte är skadad.
8. Om dynan är skyddad med hygienöverdrag undvik att använda andra heltäckande, plastade skydd i kombination med dynan. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
9. Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet.
10. Långvarigt sittande ökar risken för DVT (djup ventrombos).
11. Kontrollera regelbundet huden för rodnad. Om rodnad uppkommer sluta omedelbart använda dynan, kontakta ordinatoren.
12. Dynan är främst tänkt att användas på plansits. Är det en hängsits med större "häng" än ca 25 mm, rekommenderas en utjämningsplatta.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Curera® Sittdyna är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42 EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Den uppfyller tillämpliga delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

Tillverkningen av Curera® Sittdyna är CFC-fri och skumkärnan är av allergivänlig polyeter.

1.2 Avsedd användning

Curera® Sittdyna är en följsam, bekväm och hållbar sittdyna avsedd för användning i rullstol, men kan naturligtvis även nyttjas i/på möbler. Dynan är konstruerad för att ge bra tryckutjämning och sittstabilitet. Curera®-dynan är lämplig att använda då hög komfort önskas. Curera® Sittdyna rekommenderas för brukarvikter upp till och med 120 kg.

OBS! Curera® Sittdyna rekommenderas ej som underlag vid uppkommit trycksår. Då bör en specialdyna användas. Om du känner smärta eller noterar kvarstående hudrodnad, ska du omgående kontakta din förskrivare för att få råd och hjälp.

1.3 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av denna produkt rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madrassguiden

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. Denna information hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställs via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

1.4 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

2 Produktbeskrivning och prestanda

2.1 Förklaring överdrag

Överdraget av polyuretanbelagd polyester är enkelt att hantera och sköta och klarar högt ställda krav på rengöring och hygien. För information om rengöring se punkt 4.

Hygienöverdraget är vätsketätt, enkelt att hantera och sköta. Ett elastiskt och följsamt överdrag med antiglid på undersidan samt avtagbart med dragkedja på bakkanten.

2.2 Beskrivning produkt

Curera® Sittdyna kännetecknas av hög komfort, god funktionalitet och är enkel att rengöra. Märkning på dynan gör den enkel att placera rätt.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: 100 % flamskyddat polyeterskum

Höjd: 6 cm

Garanti: 1 år

Brand: ISO 7176-16


Artikelinformation Curera® Sittdyna, inklusive hygienöverdrag.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. max brukarvikt/kg
52-035035	35x35x6 cm	120
52-035041	35x41x6 cm	120
52-040041	40x41x6 cm	120
52-040046	40x46x6 cm	120
52-040050	40x50x6 cm	120
52-045041	45x41x6 cm	120
52-045046	45x46x6 cm	120
52-045050	45x50x6 cm	120
52-050046	50x46x6 cm	120
52-050050	50x50x6 cm	120

3 Handhavande

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.


- Dynan placeras i rullstolen med "rutorna" uppåt (känn med handen) och den fasade kanten framåt.

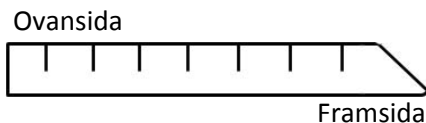

- Dynan är i första hand tänkt att användas på plansits. Är det en hängsits med större "häng" (h) än cirka 25 mm, rekommenderas utjämningsplatta.



- Ta på och av överdraget som bilderna nedan visar, så minimerar du risken att det går sönder.

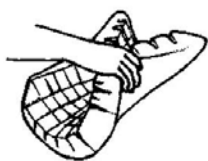

Notera!

Vid behov kan Curera® Sittdyna beskäras för att passa alla stolar. Även överdraget kan sys om.

4 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

NOTERA!

Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlets bruksanvisning noggrant.

Om bärigheten fortfarande är bra och ingen smittorisk föreligger, kan dynan, efter rengöring enligt nedan, återanvändas till ny person.

HYGIENÖVERDRAG



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdraget kan maskintvättas i max 95 °C, torktumlas, alternativt droptorkas.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

SKUMDYNA



Punktrensning med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Pressa ur eventuellt vatten varsamt. OBS! Vrid eller rulla ej dynan för att få ut vattnet. Låt dynan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den skall vara helt torr innan den tas i bruk igen.

5 Övrig information

5.1 Förvaring

Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme. Se till att dynan är helt torr innan den läggs på förvaring. Undvik att utsätta dynan för direkt solljus.

5.2 Märkning

Produkten är märkt med produktnamn, tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel och tvättråd, EAN-nummer. Även ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn). Den är även märkt hur den skall placeras i stolen.

5.3 Garanti

Garantitid för denna produkt anges under punkt 2.2.

Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten. Ej heller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

5.4 Service och underhåll

Produkten kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

5.5 Livslängd

Beräknad livslängd för denna produkt är 2 år.

5.6 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

5.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

5.8 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Maskintvätt 95 °C



<1%
Klor



Torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning

6 Tillbehör

Till Curera® Sittdyna finns även tillbehör som separata hygienöverdrag

Hygienöverdrag, Curera® Sittdyna

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)
521-035035	35x35x6 cm	521-045041	45x41x6 cm
521-035041	35x41x6 cm	521-045046	45x46x6 cm
521-040041	40x41x6 cm	521-045050	45x50x6 cm
521-040046	40x46x6 cm	521-050046	50x46x6 cm
521-040050	40x50x6 cm	521-050050	50x50x6 cm

För mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden på 0771-106 600 eller gå in på vår hemsida – www.careofsweden.se



Tillverkare/Manufactured by

care of sweden
Supporting Life

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600
Fax: 0325-128 40
E-post: info@careofsweden.se
Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00):**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo