

Liljenberg 3-delad madrass



Mjukfibermadrass

Liljenberg 3-delad madrass

Madrassen består av tre mjukfiberdelar som ligger i ett madrassfodral med fickor. Detta gör att man kan flytta delarna i madrassen för en jämnare belastning samt att man kan rengöra varje del var för sig. Går även att använda i en vanlig hushållstvättmaskin.

Utsatta kroppsdelar avlastas och de glatta fibrerna motverkar skjuvning. Madrassen är mycket uppskattad av brukare som har värk och smärttillstånd.

Fakta

Vikt: 4.3 kg

Färg: Benvit

Brand: SS 876 00 01

Garanti: 2 år

Tvättanvisning: Normalfall - tvätta i 60 °C. Vid infektionsrisk/hård nedsmutsning - tvätta i 70 °C, minst 10 min. Torktumlas i normal temperatur.



Hantering

Liljenberg 3-delad madrass läggs på en vanlig madrass och fästs på underliggande madrass med resårbanden i hörnen. Bädda med lakan, samt vid behov, inkontinensskydd eller hygienunderlägg. För att undvika ökad belastning mot huden, använd så få lager som möjligt mellan brukare och madrass.

Storlekar

80/90/105/120x200 cm.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2016-09-16.



Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 care of sweden
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
0771-106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se