

Optimal Care



Bilden visar en madrass med Evac-överdrag

Skön komfort & support

Optimal Care

En modern madrass bör ha bra egenskaper för prevention av trycksår, erbjuda bra komfort och vara enkel att hantera. Sammantaget bör den dessutom erbjuda goda hälsoekonomiska egenskaper. Optimal Care är framtagen för att matcha kraven på en modern madrass till vårdsektorn.

Optimal Care är en tryckreducerande madrass indelad i zoner som är anpassade efter kroppen. Den har även förstärkta sidor vilka ger support vid i och urstigning. Optimal Care är en kvalitetsmadrass där du kan ställa höga krav på kvalitet, komfort och support.

Den unika märkningen, bland annat innehållande brukarinformation och hantering, samt den bifogade

Fakta

Kärna: Högelastiskt kallskum 50 kg/m³

Höjd: 14 cm

Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾

Rekommenderad brukarvikt: 0-160 kg

Brand: EN 597-1, -2

Garanti: 3 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Funktioner och egenskaper

Tryck

Högelastiska kvalitetsmaterial och ett modulsystem för en effektiv tryckutjämning.

Skjuv

Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.

Fukt

Hygienöverdraget "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.

bruksanvisningen gör det enkelt att använda madrassen.

Optimal Care levereras med flera olika alternativ på hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.

Optimal Care tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Det finns även en variant, Optimal Care Duo, med modulsystem på båda sidor vilket gör den vändbar.

Tillgängliga överdrag

Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Olivia H

Droppskyddad dragkedja på tre sidor och transporthandtag.

Evac

Tvådelat överdrag med funktionshandtag för bland annat evakuering. Även lågfriktionstopp finns som tillval.

Nordic

Svetsade sömmar, droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en långsida.

Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

Storlekar

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200/210 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Referenser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjödes.

Senast uppdaterad: 2018-02-02.



Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 **care of sweden**
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
0771-106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se