

Bruksanvisning

2018-12-07

CuroCell S.A.M.[®] PRO

Statisk Antidecubitusmadrass

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001410-SE0000



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Produktbeskrivning	5
Installation och uppstart	8
Rengöring och rekonditionering	10
Förvaring	11
Underhåll	12
Felsökning	13
Teknisk beskrivning	14
Reservdelar	16
Tillval och tillbehör	18
Garanti	19
Övrig information	20
Egna noteringar	21

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING! För att minimera risken för brand, elektriska stötar eller skada på personer.

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar (exempelvis pump och madrass), tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Pumpen får inte användas i våtutrymmen där den riskerar att komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Hantera aldrig en pump som hamnat i kontakt med vatten/vätska, dra omedelbart sladden ur eluttaget, skicka pumpen för service till auktoriserad servicetekniker.
3. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
4. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! Var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används.
5. Använd aldrig produkten om pumpens elsladd eller stickpropp är trasig, om pumpens hölje är skadat, eller om den inte fungerar normalt. Kontakta auktoriserad servicetekniker för genomgång och reparation.
6. Kontrollera regelbundet produktens funktion genom "hand check" se punkt 3.4. Kontrollera också så att komfortinställningen är rätt inställd enligt tabell på pumpen.
7. Om produkten används av brukare som kräver särskild tillsyn (till exempel barn) ska användningen övervakas kontinuerligt.
8. Madrassen är skyddad med hygienskydd, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med madrassen. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
9. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
10. Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet och madrassen.
11. Är överdraget utrustat med sidohandtag är dessa till för att lyfta själva madrassen med. All annan användning sker på eget ansvar och omfattas ej av produktgarantin.
12. Pumpens elsladd bör placeras så att risken för att snubbla på den minimeras, använd kabelhållare om möjligt.
13. Risk för kvävning om elsladden händelsevis kommer runt brukarens hals, använd kabelhållare om möjligt samt se till att patient ligger korrekt placerad på sängen enligt anvisning.

1. Introduktion

CuroCell S.A.M.[®] PRO är en statisk luftmadrass som kan användas i alla typer av vårdmiljöer och är mycket funktionell och kostnadseffektiv.



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Detta system är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

Systemet har bland annat testats och godkänts enligt följande standards: EN 60601-1, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.2 Avsedd användning

CuroCell S.A.M.[®] PRO kan användas i alla typer av vårdmiljöer, för att förebygga trycksår samt som hjälpmedel vid behandling till och med kategori 3⁽¹⁾. Systemet kan även användas som ett hjälpmedel vid smärtterapi. CuroCell S.A.M.[®] PRO är ett statiskt luftmadrasssystem avsett för kontinuerlig användning.

1.3 Varianter

Produkten finns som bäddmadrass (CuroCell S.A.M.[®] PRO, CuroCell S.A.M.[®] PRO CF10) att placeras ovan på befintlig madrass, eller som kombimadrass (CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16), med en integrerad skumkärna, som placeras direkt på sängbotten.

Rekommenderad brukarvikt för detta system är upp till 250 kg.

Vi rekommenderar att lägesändringar av brukaren utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal, beroende på brukarens status, diagnos och allmäntillstånd.

Rengöring av madrassen skall ske mellan varje brukare.

NOTERA!

- Vid användning med positioneringskuddar, läs noga kuddarnas bruksanvisning för att placera brukaren på rätt sätt.
- Vid all användning i kombination med evakueringslakan är det behörig personal som ansvarar för att en evakuering kan utföras på ett säkert sätt.
- Tänk på att underliggande madrass är viktig för produktens funktion.
- Madrassen är olämplig att använda i samband med röntgenundersökningar. Detta på grund av risken för suddiga bilder eller artefakter i bild som kan leda till diagnostiska fel.
- Förvara eller använd inte produkten i direkt solljus. Produkten kan ta skada av den förhöjda temperaturen och UV-ljus.

1.4 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.


Madrassguiden

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. CuroCell S.A.M.® PRO är en madrass i funktionsgrupp B. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.


2. Produktbeskrivning

2.1 Pump - Framsida

1. Komfortvred.
 2. Manöverpanel.
 3. Skal, framsida.
 4. Anslutning slangar.
 5. Anslutning elsladd.
 6. Huvudströmbrytare.
- Används för att stänga av/sätta på pumpen. Grön lampa indikerar att pumpen är i gång.
7. Skal, baksida.

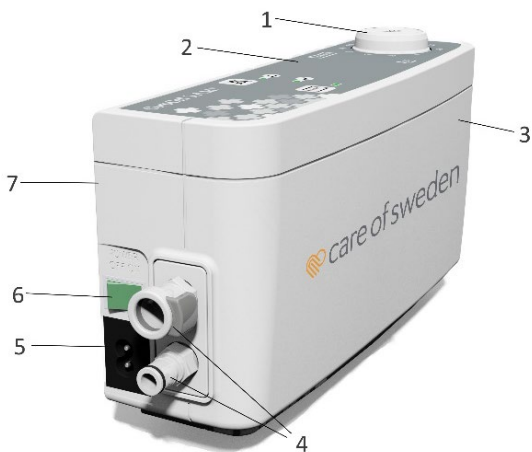

- A. Hängare.
- B. Säkringar (2 st T1A/250V).
- C. Etikett.
- D. Luftfilter.

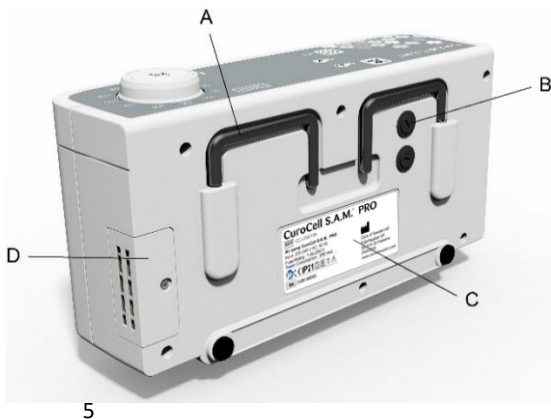

2.2 Pumpens funktioner - Manöverpanel



Komfortvred - Komfortinställning

Vredet justerar lufttrycket i madrassen. När vredet vrids medurs så ökar lufttrycket i madrassen. Vrider man vredet moturs så minskar lufttrycket i madrassen.



Vid sittande rekommenderas att trycket höjs med + 25 kg. Kontrollera med handcheck (se 3.4).



Maximalt tryck (Omvårdnadsläge)

Med denna funktion fylls hela madrassen och ger ett fast stöd. Den kan användas i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttningar i och ur säng. Funktionen återgår automatiskt till föregående inställning efter cirka 30 minuter.



Informationssignal

Ljud- och ljussignal som aktiveras vid för lågt tryck i madrassen.



Stänga av informationssignal

Stäng av ljudet genom att trycka på "ljud av" knappen. Ljudet aktiveras igen efter 7 minuter ifall trycket inte återgått till det normala.

Vid problem med notifieringar se punkt 7 för felsökning.




Normalt tryck

Lampan lyser med fast sken när madrassen är klar att användas. Den blinkar när luft pumpas till madrassen.

2.3 Madrass

1. Celler/luftblåsa 2. Slangar 3. Slanghållare 4. CPR (Snabbtömning)

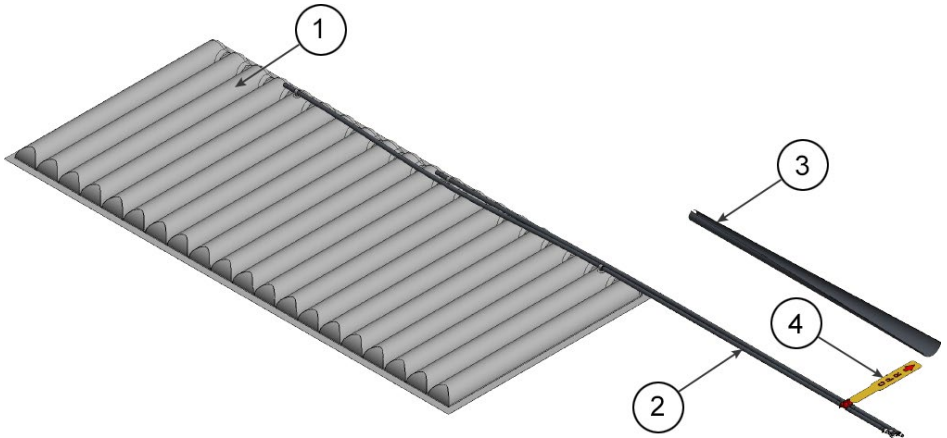

2.4 Övriga delar

Hygienöverdrag

Inneröverdrag Soft (tillbehör CuroCell S.A.M.® PRO)

Transport och förvaringsväska (tillbehör)

Integrerad skumkärna (enbart CuroCell S.A.M.® PRO CF16)

3. Installation och uppstart

3.1 Installation

Kontrollera vid upppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

1. Placera madrassen ovanpå befintlig madrass och fäst resårbanden runt den underliggande madrassen.

Notera! Om madrassen har integrerad skumkärna (CuroCell S.A.M.® PRO CF16) läggs madrassen direkt på sängbotten. Fäst madrassen mot sängbotten med banden på överdraget, i sängens rörliga delar.

2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotändan eller ställ den på ett plant, stadigt underlag. Placera elsladden så att man inte riskerar att snubbla på den, köra över den med sänghjulen eller att den kommer i kläm vid manövrering av sängen.

3. Anslut luftslangarna från madrassen på pumpens sida. Pumpen och slangarna har snabbkopplingar, ett "klick" kommer att höras när dessa är rätt hopsatta.

4. Kontrollera att strömbrytaren på pumpen står på "0" (av). Sätt i stickproppen i ett godkänt eluttag (220 V).

NOTERA!

- Bädda madrassen med lakan för ökad komfort.
- Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
- Kontrollera att madrassen har korrekt storlek för sängen.

3.2 Uppstart



NOTERA! Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1. Starta pumpen genom att trycka på "1" (på), på pumpens sida.

2. Pumpen börjar nu fylla madrassen med luft. Den gröna lampan med symbolen ✓ blinkar under fyllnadsfasen, det tar ca 15 minuter för madrassen att fyllas med luft.

3. När symbolen ✓ lyser med fast grönt sken är systemet klart att användas.

3.3 Komfortinställning

Lufttrycket i madrassen kan justeras efter brukarens önskemål om komfort. Rådgör dock alltid med din förskrivare eller behörig personal för lämplig inställning.

Lämpligt lufttryck ställs in med vredet (0-250 kg). Riktvärden ges på skalan. Vid sittande rekommenderas att trycket höjs med + 25 kg. Kontrollera med hand check, se pkt 3.4.

NOTERA!

- Vid all användning där huvudända på sängen höjs skall trycket ökas med 25 kg.
- När enbart delar av madrassen belastas, till exempel för amputerade brukare, bör trycket höjas (1-2 steg). Kontrollera sedan med handcheck, se 3.4.
- Rekommenderad brukarvikt är upp till 250 kg.

3.4 Hand check, kontroll av inställt tryck

Hand check utförs för att kontrollera att madrassen är korrekt inställd. Detta skall genomföras regelbundet, förslagsvis en gång per arbetspass samt vid positionsändringar eller vid ändring av komfortinställningen.

Öppna överdraget och stick in en flat hand under cellerna under sätet och känn efter så att brukaren inte "bottnar", d.v.s. ligger genom luftmadrassen. Vi rekommenderar att det skall vara ca ett fingers höjd till underliggande madrass.

Är marginalen för stor eller för liten, höj eller sänk komfortinställningen till närmaste övre eller lägre steg. Vänta tio minuter, gör sedan om en ny hand check.



3.5 CPR

I händelse av nödläge där HLR (hjärt- och lungräddning) måste utföras på brukaren: Dra snabbt i CPR-bandet som sitter på luftslangarna mellan madrass och pump. Lossa därefter slangkopplingarna på pumpens sida för snabbast möjliga lufttömning.

NOTERA! Efter användning var noga med att CPR-kopplingen sätts fast riktigt.



3.6 Lågt tryck

Vid ett onormalt lågt lufttryck se avsnittet felsökning, punkt 7.

3.7 Transportfunktion

Koppla loss båda slangarna från pumpen och koppla ihop dessa, madrassen försätts i "Transportfunktion". Vi rekommenderar att denna funktion enbart används under kortare tid.

Notera!

Om lufttrycket förblir lågt, sök efter skador på madrass och slangar. Reparera vid behov eller kontakta Care of Sweden alternativt en av denne auktoriserad servicetekniker.

4. Rengöring och rekonditionering

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

4.1 Rengöring

PUMP

VARNING!

Öppna ej pumphuset - fara för elchock. Service och underhåll ska utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker. Blöt inte ner eller doppa pumpen i vätska.



Torka av pumpen med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. Använd vid behov ett desinfektionsmedel såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Om annat medel används, välj ett som inte påverkar plasten på pumphuset.

MADRASSÖVERDRAG



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdrag som består av flera delar skall separeras innan tvätt. De olika delarna skall tvättas med liknande färger.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

INNERÖVERDRAG SOFT (tillbehör)



Punktrensning kan också göras med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

4.2 Rekonditionering

PUMP

Se instruktion punkt 4.1.

MADRASS

1. Koppla loss slangarna från pumpen och töm madrassen på luft. Öppna även CPR-ventilen.
2. Avlägsna överdrag. Se vidare punkt 4.1 för rengöring av överdrag. Om produkten är utrustad med skumdyna skall den tas ur och rengöras separat.
3. Flytta madrassen till rent och lämpligt tvättutrymme.
4. Torka av cellerna, slangar samt CPR-ventilen med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Låt torka.
5. Torka av arbetsytorna med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel avsett för detta ändamål.
6. Sätt ihop madrassen. Om celler av något skäl lossnat från slangarna skall dessa sättas tillbaka enligt ritning punkt 2.3. Stäng CPR-ventilen.

SKUMDYNA (CuroCell S.A.M.® PRO CF16)



Punktrengöring med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Pressa ur eventuellt vattnen varsamt. OBS! Vrid eller rulla ej dynan för att få ut vattnet. Låt dynan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den skall vara helt torr innan den tas i bruk igen.

NOTERA!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut. Kontrollera även pumpen, slanganslutningar och elsladd vid rengöring. Skadade delar skall bytas ut eller lagas.

5. Förvaring

Madrass och pump förvaras lämpligast i produktens väska (tillbehör), placera pumpen så att den skyddas av madrassen. Hantera den hoppackade produkten varsamt. Ställ ej något tungt ovanpå. Pumpen skall förvaras inomhus i torr miljö utan kontakt med direkt solljus.

6. Underhåll


1. Kontrollera att elsladden och stickproppen är fria från skador och repor.
2. Kontrollera att madrasskyddet är helt och att överdrag och luftceller är korrekt hopsatta.
3. Kontrollera att luft kommer från utgångarna på pumpens sida.
4. Kontrollera att inga slangar eller kopplingar är trasiga eller klämda.

Kontakta Care of Sweden vid behov av reservdelar.

6.1 Luftfilter- och säkringsbyte

Luftfilter (A):

1. Lossa den lilla skyddsplattan på pumpens baksida med hjälp av en stjärnmejsel.
2. Ta loss filtret ur hållaren.
3. Placera det nya filtret i hållaren och sätt tillbaka skyddsplattan och fäst med skruv.

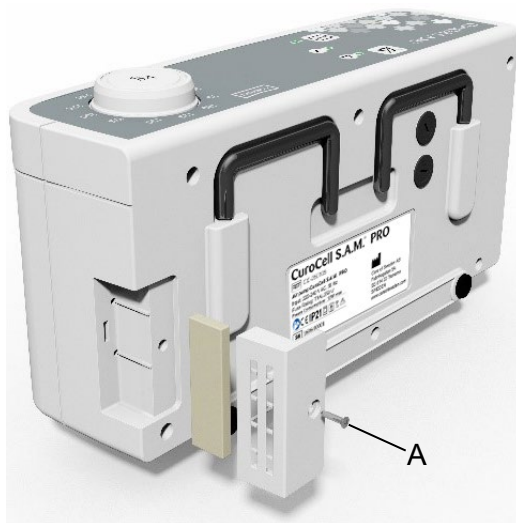

Säkringar (B):

1. Lossa säkringshållaren med skruvmejsel.
2. Byt säkring till en ny med märkning T1A/ 250V, notera att det finns 2st säkringar.
3. Sätt tillbaka säkringshållaren med skruvmejsel



7. Felsökning

Problem	Lösning
Pumpen startar inte	Kontrollera att elsladden anslutits till eluttag. Kontrollera att ingen säkring har gått.
Pumpen är i drift men madrassen fylls inte med luft	Kontrollera om det kommer luft från pumpen och om elsladden är korrekt ansluten. Om pumpen fungerar normalt men ingen luft kommer ut bör pumpen lämnas in för service. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd. Kontrollera att madrassen och madrassanslutningen inte är skadad. Kontrollera att slangarna är hela. Kontrollera att luftfiltret inte är igensatt.
Brukaren bottnar	Komfortinställningen kanske är fel inställt. Justera trycket (ligger igenom) och vänta några minuter. Kontrollera igen med "hand check", se punkt 3.4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
Madrassen ligger inte still	Kontrollera att madrassen är fäst vid underliggande madrass med resårbanden, eller om madrassen har en integrerad skumkärna (CuroCell S.A.M.® PRO CF16), fäst med banden mot sängbotten, i sängens rörliga delar.
Pumpen låter, eller vibrationer känns	Kontrollera pumpens upphängning på sängen. Resonans i sängens delar kan uppstå. Ta bort pumpen och lyssna om det blir någon skillnad. Kan åtgärdas genom att ställa pumpen på ett plant, stadigt underlag. Eller genom att lägga till exempel en handduk mellan pump och säng.
Om Dina frågor inte besvaras av ovanstående information, vänligen kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.	

8. Teknisk beskrivning

8.1 Teknisk specifikation

PUMP		SPECIFIKATION
Modell		CuroCell S.A.M.® PRO
Spänning		220 V-240 V, 50 Hz
Strömförbrukning		Max 10 W
Säkringstyp		T1AL, 250 V
Dimension (LxBxH)		26 x 8 x 13 cm
Vikt		1.5 kg
Ljud		< 28dB
Omgivande miljö	Temperatur	Drift: 5 °C - 40 °C
		Förvaring: -25 °C - 70 °C
		Frakt: -25 °C - 70 °C
	Fuktighet	Drift & frakt: 5 % - 95 % icke kondenserande
		Förvaring: 10 % - 80 % icke kondenserande
	Atmosfärtryck	Drift: 700 hPa-1060 hPa
		Förvaring & Transport: 500 hPa-1060 hPa
Klassificering		Klass II, Typ BF, IP21
MADRASS		SPECIFIKATION
Modell		CuroCell S.A.M.® PRO/CuroCell S.A.M.® PRO CF10/CuroCell S.A.M.® PRO CF16
Dimension (BxLxH)		80/85/90/105/120x200/210x10/16 cm
Vikt		2.6 kg (85x200 cm) / 8.1 kg (85x200 cm)

OBS! Care of Sweden förbehåller sig rätten att när som helst modifiera specifikationen för produkten.

WARNING!

Följ drifts- och underhållsanvisningarna noggrant för att förebygga såväl personskador som skador på produkten eller annan utrustning.

8.2 Märkning

Produkten är märkt med produktnamn, tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel och tvättråd samt EAN-nummer. Den har också upp/ner och huvud/fot anvisningar. Även en ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn).

8.3 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Fotplacering



Läs bruksanvisningen



Funktionsgrupp



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Kastas ej i hushållsavfall, följ
instruktioner för återvinning



Rekommenderad brukarvikt



Brukarinformation - kategori



Placeras direkt
på sängbotten



Placeras ovanpå
befintlig madrass



Kan roteras



Kan vändas



Motverkar skjuv



Hälfunktion (Beskrivs som
text "Heelfunction" på
överdraget)



Tål ej maskintvätt



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



Klor
<1%



Torktumling



Ej torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning



Klass II utrustning
(Dubbelisolerad)




Typ BF



IP-klass (Kapslingsklass)



Farlig elektrisk spänning

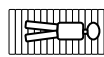

Madrassen ska användas
med brukaren liggande i
längsgående riktning

9. Reservdelar

	Överdrag Steel till CuroCell S.A.M. PRO	Överdrag Steel till CuroCell S.A.M. PRO CF10	Överdrag Stone till CuroCell S.A.M. PRO CF10
Storlek	Art.nr	Art.nr	Art.nr
80x200 cm	SC201-080200-SE0000	SC220-080200-SE0000	SC221-080200-SE0000
80x210 cm	SC201-080210-SE0000	SC220-080210-SE0000	SC221-080210-SE0000
80x220 cm	SC201-080220-SE0000	SC220-080220-SE0000	SC221-080220-SE0000
85x200 cm	SC201-085200-SE0000	SC220-085200-SE0000	SC221-085200-SE0000
85x210 cm	SC201-085210-SE0000	SC220-085210-SE0000	SC221-085210-SE0000
85x220 cm	SC201-085220-SE0000	SC220-085220-SE0000	SC221-085220-SE0000
90x200 cm	SC201-090200-SE0000	SC220-090200-SE0000	SC221-090200-SE0000
90x210 cm	SC201-090210-SE0000	SC220-090210-SE0000	SC221-090210-SE0000
90x220 cm	SC201-090220-SE0000	SC220-090220-SE0000	SC221-090220-SE0000
100x200 cm	SC201-100200-SE0000	SC220-100200-SE0000	SC221-100200-SE0000
100x210 cm	SC201-100210-SE0000	SC220-100210-SE0000	SC221-100210-SE0000
100x220 cm	SC201-100220-SE0000	SC220-100220-SE0000	SC221-100220-SE0000
105x200 cm	SC201-105200-SE0000	SC220-105200-SE0000	SC221-105200-SE0000
105x210 cm	SC201-105210-SE0000	SC220-105210-SE0000	SC221-105210-SE0000
105x220 cm	SC201-105220-SE0000	SC220-105220-SE0000	SC221-105220-SE0000
120x200 cm	SC201-120200-SE0000	SC220-120200-SE0000	SC221-120200-SE0000
120x210 cm	SC201-120210-SE0000	SC220-120210-SE0000	SC221-120210-SE0000
120x220 cm	SC201-120220-SE0000	SC220-120220-SE0000	SC221-120220-SE0000

	Toppdel Olivia till CuroCell S.A.M. PRO CF16	Toppdel Stone till CuroCell S.A.M. PRO CF16	Underdel CuroCell till CuroCell S.A.M. PRO CF16
Storlek	Art.nr	Art.nr	Art.nr
80x200 cm	ST101-080200-SE0000	ST102-080200-SE0000	SB101-080200-SE0000
80x210 cm	ST101-080210-SE0000	ST102-080210-SE0000	SB101-080210-SE0000
80x220 cm	ST101-080220-SE0000	ST102-080220-SE0000	SB101-080220-SE0000
85x200 cm	ST101-085200-SE0000	ST102-085200-SE0000	SB101-085200-SE0000
85x210 cm	ST101-085210-SE0000	ST102-085210-SE0000	SB101-085210-SE0000
85x220 cm	ST101-085220-SE0000	ST102-085220-SE0000	SB101-085220-SE0000
90x200 cm	ST101-090200-SE0000	ST102-090200-SE0000	SB101-090200-SE0000
90x210 cm	ST101-090210-SE0000	ST102-090210-SE0000	SB101-090210-SE0000
90x220 cm	ST101-090220-SE0000	ST102-090220-SE0000	SB101-090220-SE0000
100x200 cm	ST101-100200-SE0000	ST102-100200-SE0000	SB101-100200-SE0000
100x210 cm	ST101-100210-SE0000	ST102-100210-SE0000	SB101-100210-SE0000
100x220 cm	ST101-100220-SE0000	ST102-100220-SE0000	SB101-100220-SE0000
105x200 cm	ST101-105200-SE0000	ST102-105200-SE0000	SB101-105200-SE0000
105x210 cm	ST101-105210-SE0000	ST102-105210-SE0000	SB101-105210-SE0000
105x220 cm	ST101-105220-SE0000	ST102-105220-SE0000	SB101-105220-SE0000
120x200 cm	ST101-120200-SE0000	ST102-120200-SE0000	SB101-120200-SE0000
120x210 cm	ST101-120210-SE0000	ST102-120210-SE0000	SB101-120210-SE0000
120x220 cm	ST101-120220-SE0000	ST102-120220-SE0000	SB101-120220-SE0000

Cellpaket inkl. slangset med CPR och snabbkoppling

Art.nr	Storlek	Art.nr	Storlek
CC-250900	80x200 cm	CC-250909	100x200 cm
CC-250901	80x210 cm	CC-250910	100x210 cm
CC-250902	80x220 cm	CC-250911	100x220 cm
CC-250903	85x200 cm	CC-250912	105x200 cm
CC-250904	85x210 cm	CC-250913	105x210 cm
CC-250905	85x220 cm	CC-250914	105x220 cm
CC-250906	90x200 cm	CC-250915	120x200 cm
CC-250907	90x210 cm	CC-250916	120x210 cm
CC-250908	90x220 cm	CC-250917	120x220 cm

Art.nr	Beskrivning
SP101-SE0000	Madrasspump CuroCell S.A.M. PRO
CC-908060	Slangset CuroCell S.A.M. PRO, 200 cm
CC-908061	Slangset CuroCell S.A.M. PRO, 210 cm
CC-908062	Slangset CuroCell S.A.M. PRO, 220 cm

Vid behov av andra reservdelar, vänligen kontakta Care of Sweden.

10. Tillval och tillbehör

10.1 Tillval

Inneröverdrag Soft

Till brukare som är väldigt känsliga kan inneröverdrag Soft väljas, vilket ytterligare förhöjer komforten i madrassen (ingår i CuroCell S.A.M.® CF10 och CuroCell S.A.M.® CF16). Cellpaket placeras i inneröverdraget med den mjuka skumsidan upp.

Kraftig transportväska

Transport- och Förvaringsväska.

Överdrag

Med svetsade sömmar.

10.2 Tillbehör

	Inneröverdrag CuroCell S.A.M. PRO CF10	Inneröverdrag CuroCell S.A.M. PRO CF16
Storlek	Art.nr	Art.nr
80x200 cm	SI101-080200-SE0000	SI120-080200-SE0000
80x210 cm	SI101-080210-SE0000	SI120-080210-SE0000
80x220 cm	SI101-080220-SE0000	SI120-080220-SE0000
85x200 cm	SI101-085200-SE0000	SI120-085200-SE0000
85x210 cm	SI101-085210-SE0000	SI120-085210-SE0000
85x220 cm	SI101-085220-SE0000	SI120-085220-SE0000
90x200 cm	SI101-090200-SE0000	SI120-090200-SE0000
90x210 cm	SI101-090210-SE0000	SI120-090210-SE0000
90x220 cm	SI101-090220-SE0000	SI120-090220-SE0000
100x200 cm	SI101-100200-SE0000	SI120-100200-SE0000
100x210 cm	SI101-100210-SE0000	SI120-100210-SE0000
100x220 cm	SI101-100220-SE0000	SI120-100220-SE0000
105x200 cm	SI101-105200-SE0000	SI120-105200-SE0000
105x210 cm	SI101-105210-SE0000	SI120-105210-SE0000
105x220 cm	SI101-105220-SE0000	SI120-105220-SE0000
120x200 cm	SI101-120200-SE0000	SI120-120200-SE0000
120x210 cm	SI101-120210-SE0000	SI120-120210-SE0000
120x220 cm	SI101-120220-SE0000	SI120-120220-SE0000

Art.nr	Beskrivning
CC-9091	Kraftig transport- och Förvaringsväska till CuroCell S.A.M.® PRO
CC-9093	Kraftig transport- och Förvaringsväska till CuroCell S.A.M.® PRO CF10
58-900909	Kraftig transport- och Förvaringsväska till CuroCell S.A.M.® PRO CF16

10.3 Övriga tillbehör

För bästa komfort rekommenderar vi användning av tillbehör från Care of Sweden eftersom våra produkter är anpassade till att fungera väl ihop. Vid behov av tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden eller gå in på vår hemsida - www.careofsweden.se.

11. Garanti

11.1 Omfattning

Detta CuroCell® system omfattas av 2 års garanti avseende tillverkningsfel. Garantin gäller inte normal förslitning eller vid skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering och skötsel.

11.2 Service och underhåll

CuroCell® madrasserna är medicintekniska produkter, enligt MDD 93/42/EEC, som ska användas förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Därför rekommenderas att produkten regelbundet lämnas in för service och kontroll, så att dess funktion och prestanda bibehålls (läs om Årsservice nedan). En välskött pump arbetar bättre och håller längre, precis som andra tekniska apparater.

Under produktens förväntade livslängd kommer vissa slitagedelar i pumpen att kräva service av en auktoriserad servicetekniker för bibehållen god funktion och prestanda. Omfattning och intervall beror på hur mycket produkten brukas.

Vid en Årsservice blir produkten grundligt kontrollerad och servad av vår serviceavdelning. Filter och förslitningsdelar rengörs/byts vid behov. Kontakta gärna Care of Sweden för mer information.

Service och underhåll ska alltid utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad tekniker. Endast reservdelar godkända av Care of Sweden får användas. Användning av icke godkända reservdelar omintetgör garantin.

Fel eller brister som betecknas som garantifel åtgärdas utan kostnad. Reklamation ska anmälas till Care of Sweden innan en produkt eventuellt återsänds.

11.3 Livslängd

Madrassens förväntade livslängd är 5 år.

12. Övrig information

12.1 Demontering och källsortering

Nästan allt material i CuroCell® produkterna, undantaget vissa delar i pumparna, kan energiåtervinnas genom förbränning vid därför avsedda förbränningsanläggningar.

Pump: Förbrukad CuroCell® pump ska ej tas isär, utan lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Elektronikavfall".

Madrass: Förbrukad CuroCell® madrass lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Brännbart avfall".

Care of Sweden uppfyller sitt producentansvar genom att vara ansluten till REPA-registret och El-kretsen AB. För mer information kontakta Care of Sweden.

12.2 Rekonditionering – Service – Reparation

Kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad serviceenhet vid behov av service eller reparation. Beskriv felet/problemet innan produkten eventuellt återsänds.

Telefon måndag till fredag klockan 8.00 - 16.30: 0771-106 600

Telefon vid akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)

Tel: 0325-101 11

E-post:

Fax: 0325-128 40

service@careofsweden.se

12.3 Retur/reklamation

Kontakta Care of Sweden **innan** produkten eventuellt återsänds. Vid fel som faller under produktgarantin bekostas returfrakten av Care of Sweden, i annat fall av kunden.

13. Egna noteringar



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB

Box 146

514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A

514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A

514 33 Tranemo