

## Bruksanvisning

2019-05-02

## CuroCell® 4 AD

Växeltrycksmadrass

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001045



7 331345 016047



## **Innehållsförteckning**

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Produktbeskrivning	6
Montering/Installation	8
Drift	9
Rengöring och rekonditionering	11
Förvaring	13
Underhåll	13
Felsökning	14
Teknisk beskrivning	15
Reservdelar	17
Tillval och tillbehör	17
Garanti	18
Övrig information	19

# VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

## Läs alla instruktioner före användning

**VARNING!** För att minimera risken för brand, elektriska stötar eller skada på personer.

- 1 Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar (exempelvis pump och madrass), tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
- 2 Pumpen får inte användas i våtutrymmen, eller där den riskerar att komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Hantera aldrig en pump som hamnat i kontakt med vatten/vätska, dra omedelbart sladden ur eluttaget, skicka pumpen för service till auktoriserad servicetekniker.
- 3 FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
- 4 Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används.
- 5 Använd aldrig produkten om pumpens elsladd eller stickpropp är trasig, om pumpens hölje är skadat, eller om den inte fungerar normalt. Kontakta servicetekniker för genomgång och reparation.
- 6 Kontrollera regelbundet produktens funktion genom "hand check" se punkt 4.4. Kontrollera också så att komfortinställningen är rätt inställd enligt tabell på pumpen.
- 7 Om produkten används av brukare som kräver särskild tillsyn (till exempel barn) ska användningen övervakas kontinuerligt.
- 8 Madrassen är skyddad med hygienskydd, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med madrassen. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
- 9 Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
- 10 Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet.
- 11 Är överdraget utrustat med sidohandtag är dessa till för att lyfta själva madrassen med. All annan användning sker på eget ansvar och omfattas ej av produktgarantin.
- 12 Observera att brukaren inte kommer i kontakt med pumpens upphängningsanordning, detta för att minimera risken att sår uppstår på fötterna.

# 1. Introduktion

CuroCell® luftmadrasser arbetar enligt växeltrycksprincipen, en teknik som är mycket väl beprövad och använts under lång tid. Med växeltryck menas att trycket flyttas regelbundet mellan cellerna för att efterlikna kroppens egna rörelser. Man skapar perioder då trycket är lägre eller helt utan tryck, detta ger bra förutsättningar för huden att återhämta sig eller att förebygga skador.



Läs alltid bruksanvisningen före användning.


## 1.1 Allmän information

Detta system är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Systemet har bland annat testats och godkänts enligt följande standarder: IEC 600601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

## 1.2 Avsedd användning

CuroCell® 4 AD är en växeltrycksmadrass som kan användas i alla typer av vårdmiljöer, för att förebygga trycksår samt som ett hjälpmedel vid behandling till och med kategori 4. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är upp till 200 kg. CuroCell® 4 AD är en kombimadrass som placeras direkt på sängbotten. Vi rekommenderar att lägesändringar utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal, beroende på brukarens status, diagnos och allmäntillstånd.

Madrassen ska användas med brukaren liggande i längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

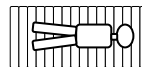

Rengöring av madrassen skall ske mellan byte av varje brukare.

## **NOTERA!**

- För vissa användare, till exempel amputerade brukare, kan det rekommenderade längdmåttet underträdas. Brukare inom dessa grupper kan dock kräva andra inställningar, då hela ytan inte belastas. För funktionskontroll, se punkt 4.3 och 4.4.
- Vid användning med positioneringskuddar, läs noga kuddarnas bruksanvisning för att placera brukaren på rätt sätt.
- Vid all användning i kombination med evakueringslakan är det behörig personal som ansvarar för att en evakuering kan utföras på ett säkert sätt.
- Var aktsam vid manövrering av eventuella sidogrindar/skydd på sängen så att madrassen ej kommer i kläm och skadas.
- Madrassen får ej lyftas med brukaren på, eller användas till någon annan form av transport än vid en eventuell evakuering med evakueringslakan.
- Madrassen är olämplig att använda i samband med röntgenundersökningar. Detta på grund av risken för suddiga bilder eller artefakter i bild som kan leda till diagnostiska fel.

*(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.*

## **1.3 Övrig information**

### **Handlingsplan Trycksår**


För bästa möjliga resultat vid användning av denna produkt rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

### **Madrassguiden**

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. CuroCell® 4 AD är en madrass i funktionsgrupp C. Denna information kan hämtas på vår hemsida [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se) eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.


## 2. Produktbeskrivning

### 2.1 Pump och madrass

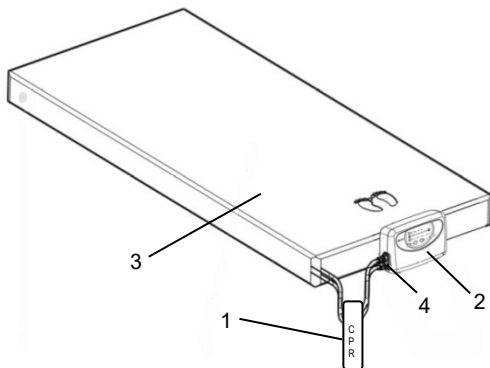


1. CPR (Snabbtömning)
2. Pump
3. Madrass
4. Anslutning pump


4 statiska huvudceller. Om produkten utrustad med ventilerade celler är dessa placerade här (9 stycken).

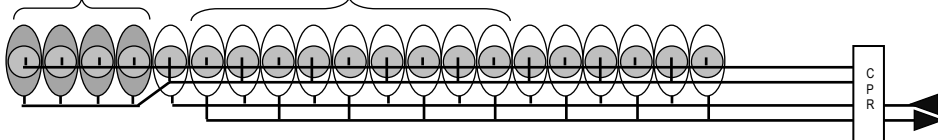

Med tillvalet "hälfunktion" är de fyra nedersta cellerna lite lägre för att avlasta hämlarna.

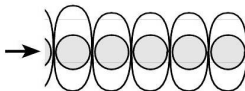


### 2.2 Pump

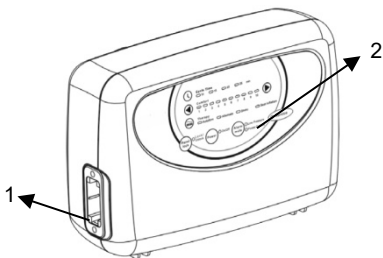

Framsida


1. Anslutning slangar
2. Manöverpanel

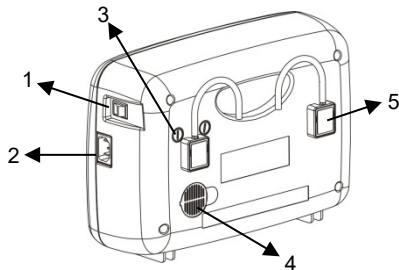

Baksida

1. Av/på (0/1)
2. Anslutning sladd
3. Säkringar, 2 st
4. Luftfilter
5. Upphångningsbyglar

## 2.3 Pumpens funktioner – manöverpanel

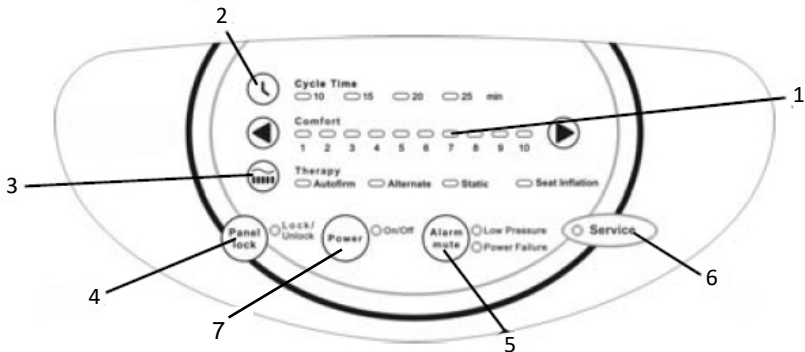

### 1. KOMFORTINSTÄLLNING (COMFORT)

Lämpligt lufttryck ställs in med pilarna (1-10). Riktlinjer utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.

### 2. CYKELTID (CYCLE TIME)

Det går att välja mellan fyra olika cykeltider. Tryck på knappen för att växla cykeltid.

### 3. PROGRAM (THERAPY)

Växla mellan olika program genom att trycka på knappen, valt läge indikeras av de gröna lamporna. De växlar i följande ordning: Autofirm, Alternate, Static, Alternate/seat inflation, Static/seat inflation.

**A. Autofirm** Autofirmläget användas för att fylla madrassen helt och för att ge ett fast stöd. Pumpen startar alltid i detta läge. När trycket har uppnåtts, ändras inställningen automatiskt till föregående inställning eller till inställning enligt förhandsinställningar nedan.

#### Förhandsinställning under Autofirm programmet

1. Program (Therapy): Välj önskat program.
2. Komfortinställning (Comfort): Ställ in önskat lufttryck (1-10).
3. Cykel tid (Cycle time): Välj mellan 10, 15, 20 eller 25 minuter.

**Notera!** Lampan för respektive valt program (Cykel tid, Komfortinställning och program) kommer att lysa tillsammans med lampan för Autofirm. Efter att madrassen är helt fylld kommer inställningarna att genomföras och lampan för Autofirm kommer att slockna.

**B. Alternate** Trycket alternerar mellan cellerna, det finns fyra olika cykeltider att välja.

**C. Static** När "STATIC"-knappen trycks in avbryts alterneringen och trycket utjämnas mellan luftcellerna. Funktionen kan användas i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttningar i och ur säng. Stäng av funktionen genom att trycka på knappen, annars sker detta automatiskt efter cirka 20 minuter.

**D. Seat inflation** Denna funktion ger ytterligare stöd i sittande läge och kan väljas både i alternerande och statiskt läge.

### 4. PANELLÅS (PANEL LOCK)

Håll in "PANEL LOCK"-knappen i cirka två sekunder för att låsa eller låsa upp panelen.

## 5. ALARM AV (ALARM MUTE)

Stänger av ljudlarmet. Detta aktiveras igen efter cirka fem minuter ifall trycket inte återgått till det normala. Vid problem med larm se punkt 8 för felsökning.

### A. Strömförsörjningsalarm (Power failure alarm)

När pumpen inte längre får ström larmar den, både med ljus och ljud. Stäng av genom att trycka på "ALARM MUTE"-knappen.

### B. Alarm vid för lågt tryck (Low pressure)

Ljud- och ljusalarm som aktiveras vid för lågt tryck i madrassen. Alarmet ljuder tills det slås av med "ALARM MUTE"-knappen.

## 6. SERVICE


Denna lampa indikerar ett tekniskt problem i pumpen. Kontrollera först att filtret är rent och att pumpen inte är täckt på något vis (såsom att den står mot en kudde, eller att en filt hänger över den). Om problemet kvarstår, kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.

## 7. POWER

Ström av/på (On/Off)

# 3. Montering/Installation

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

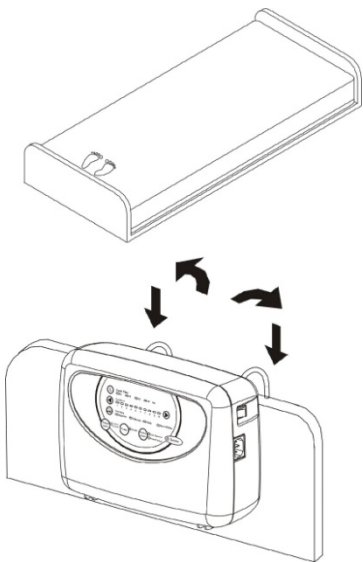

1. Placera madrassen på sängbotten. Fäst madrassen mot sängen med banden på madrassens undersida.

### Notera!

- Bädda madrassen med lakan för ökad komfort.
- Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
- Används justerbar säng skall madrassen fästas enbart i sängens rörliga delar.
- Kontrollera celler och tryckknappar så att dessa är korrekt hopsatta.


2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant, stadigt underlag.

Placera elsladden så, att man inte riskerar att snubbla på den eller köra över den med sänghjulen eller klämma den vid höjning/sänkning av sängen.


Om kabelhållare finns (tillval): öppna knapparna, placera elsladden i fickan och stäng knapparna igen.

**Notera!** Observera att brukaren inte kommer i kontakt med pumpens upphängningsanordning, detta för att minimera risken att sår uppstår på fötterna.



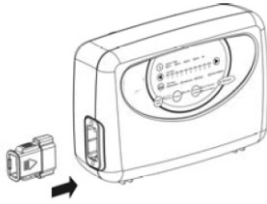

3. Koppla på luftslangarna från madrassen på pumpens sida. När ett "klick" hörs eller känns är kopplingarna rätt hopsatta.

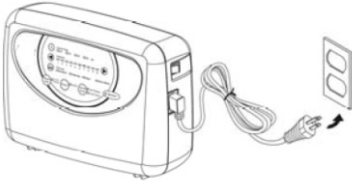

4. Kontrollera att strömbrytaren på pumpens sida står på 0 (av). Sätt i stickkontakten i ett godkänt eluttag (220 V).

## 4. Drift



**Notera!** Läs alltid bruksanvisningen före användning.

### 4.1 Starta

1. Sätt strömbrytaren på pumpens sida till 1 (på) och starta pumpen genom att trycka på strömknappen på pumpens framsida.
2. Luft börjar pumpas till madrassen. Det tar minst 20 minuter innan madrassen är klar att användas.

**Notera!** Pumpen startar alltid i programmet Autofirm.

3. Lampan för Low pressure lyser tills madrassen har nått inställt tryck. När lampan slocknar är madrassen klar att användas.



### 4.2 Val av program

Det finns fyra olika program, se punkt 2.3 för detaljerad information. Vi rekommenderar växlande läge och cykeltid tio minuter som grundinställning.

### 4.3 Komfortinställning

Lufttrycket i madrassen kan justeras efter brukarens önskemål om komfort. Rådgör dock alltid med Din förskrivare eller behörig personal för lämplig inställning.

kg		kg	
0-30	1	100-110	6
40	2	120-130	7
50	3	140-150	8
60	4	160-170	9
80-90	5	180-200	10

**Notera!** Pumpen startar alltid i programmet Autofirm. När madrassen nått tryck går den automatiskt över till tidigare använd inställning eller till inställningar gjorda under Autofirm programmet. Se punkt 2.3 för mer information.

Madrasen är nu klar att användas.

### **NOTERA!**

- Vid all användning där huvudända på sängen höjs rekommenderar vi att programmet Seat inflation (sittfunktion) används.
- När enbart delar av madrassen belastas, till exempel för amputerade brukare, bör trycket höjas (1-2 steg).
- Kontrollera alltid inställt tryck med "Hand check", se punkt 4.4.
- För rekommenderad brukarvikt, se punkt 1.2.

## **4.4 Hand check, kontroll av inställt tryck**

Hand check utförs för att kontrollera att madrassen är korrekt inställd. Detta skall genomföras regelbundet, förslagsvis en gång per arbetspass samt vid positionsändringar eller vid ändring av komfortinställningen.

Stick in en hand mellan cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte "bottnar", når botten. Vi rekommenderar två till tre fingrars marginal. Är marginalen för liten, höj komfortinställningen till närmaste övre steg. Vänta tio minuter, gör sedan en ny hand check.



## **4.5 CPR**

I händelse av nödläge där HLR (hjärt- och lungräddning) måste utföras på brukaren. Dra snabbt i CPR-bandet, lossa därefter snabbkopplingarna på pumpens sida för snabbast möjliga lufttömning.

**NOTERA!** Efter användning var noga att CPR-kopplingen sätts fast.



## **4.6 Larm**

Vid ett onormalt lågt lufttryck i madrassen tänds lampan för Low pressure (lågt tryck) tillsammans med ljudlarmet. För felsökning se avsnitt 8. Larmet avaktiveras genom att trycka på knappen ALARM MUTE på pumpens manöverpanel. Om problemet inte är löst inom cirka fem minuter kommer larmet starta på nytt. Lampan lyser ända tills trycket är åtgärdat och återställt.

Pumpen är också utrustad med ett strömförsörjningsalarm. När pumpen inte längre får ström larmar den, med ljus och ljud. Stäng av larmet genom att trycka på ALARM MUTE knappen.

### **WARNING!**

Om lufttrycket förblir lågt, sök efter skador på madrass och slangar. Reparera vid behov eller kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.


## 4.7 Transportfunktion

Om brukaren behöver flyttas i säng kan slangarna kopplas ihop (lossas från pumpen), madrassen blir statisk och försätts i så kallat Transportläge. Vi rekommenderar att denna funktion enbart används under kortare perioder.



## 4.8 Hälfunktion med ventil (tillval)

Denna funktion gör att man kan avlasta hälen. Detta görs genom att man kopplar ur (stänger ned) den cell i madrassen som befinner sig rakt under hälen. Den kommer då inte att fyllas med luft och det skapas ett mellanrum mellan cellerna som gör att hälen avlastas. Funktionen aktiveras genom att man trycker på knappen (1) och drar isär kopplingen, låt cellen finnas kvar på sin plats i madrassen. Cellen aktiveras igen genom att kopplingen sätts ihop.

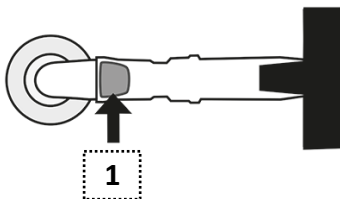

## 5. Rengöring och rekonditionering

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

### 5.1 Rengöring

#### PUMP

#### **VARNING!**

- Öppna ej pumphuset – fara för elchock. Service och underhåll ska utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.
- Blöt inte ner eller doppa pumpen i vätska.



Torka av pumpen med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. Använd vid behov ett desinfektionsmedel såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Om annat medel används, välj ett som inte påverkar plasten på pumphuset.

## MADRASSÖVERDRAG



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdrag som består av flera delar skall separeras innan tvätt. De olika delarna skall tvättas med liknande färger.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

## DISTANSTYG (tillbehör)



Punktrengöring kan också göras med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

## 5.2 Rekonditionering

### PUMP

Se instruktion punkt 5.1.

### MADRASS

1. Koppla loss slangarna från pumpen och töm madrassen på luft, öppna även CPR-ventilen.
2. Avlägsna överdrag. Se vidare punkt 5.1 för rengöring av överdrag. Om produkten är utrustad med skumdyna skall den tas ur och rengöras separat.
3. Flytta madrassen till rent och lämpligt tvättutrymme.
4. Torka av cellerna, slangar samt CPR-ventilen med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Låt torka.
5. Torka av arbetsytorna med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel avsett för detta ändamål.
6. Sätt ihop madrassen. Om celler av något skäl lossnat från slangarna skall dessa sättas tillbaka enligt ritning punkt 2.1.

### NOTERA!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut. Kontrollera även pumpen, slanganslutningar och elsladd vid rengöring. Skadade delar skall bytas ut eller lagas.

## 6. Förvaring


Madrass och pump förvaras lämpligast i produktens väska (tillbehör). Hantera den hoppackade produkten varsamt. Ställ ej något tungt ovanpå.

## 7. Underhåll

### 7.1 Allmänt


1. Kontrollera att elsladden och stickproppen är fria från skador och repor.
  2. Kontrollera att madrasskyddet är helt och att överdrag och luftceller är korrekt hopsatta.
  3. Kontrollera att luftflödet växlar mellan respektive utgång på pumpen sida.
  4. Kontrollera att inga slangar eller kopplingar är trasiga eller klämda.
- Kontakta Care of Sweden vid behov av reservdelar.

### 7.2 Säkringsbyte

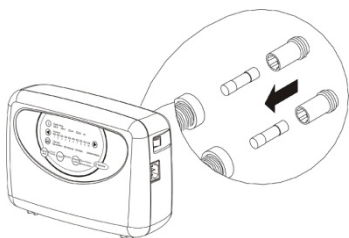

1. Dra ur stickproppen från eluttaget vid byte av säkringar.
2. Ta av locket för säkringen med en skruvmejsel. Dra ur säkringshållaren.
3. Sätt i ny säkring av samma typ T1AL, 250 V och skruva tillbaka skyddslocket. Det finns två säkringar.

### 7.3 Luftfilterbyte

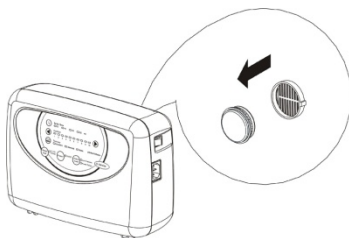

1. Lossa den lilla runda skyddsplattan på pumpens baksida.
2. Ta loss filtret ur hållaren.
3. Placera det nya filtret i hållaren och sätt på skyddsplattan.

Om pumpen används i mycket nedsmutsad miljö skall filter kontrolleras regelbundet.

## 8. Felsökning

Problem	Lösning
Pumpen startar inte	Kontrollera att elsladden anslutits till eluttag. Kontrollera säkringarna.
Larmet är på = madrassen tappar luft	Kontrollera att snabbkopplingarna till luftslangarna på pumpens sida är rätt anslutna. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd. Öppna madrassen och sök efter eventuellt läckage från luftceller eller slangar. Kontrollera att alla slangkopplingar sitter bra och är rätt kopplade.
Ingen luft i huvudcellerna	Vid uppblåsning av madrassen fylls de fyra statiska huvudcellerna sist av alla celler.
Brukaren bottnar (ligger igenom)	Komfortinställningen kanske är fel inställt. Justera upp trycket och vänta några minuter. Kontrollera igen med Hand check. Kontrollera madrassen enligt punkten "Larmet är på". Läs mer under punkt 4.3 och 4.4.
Madrassen ligger inte still	Kontrollera att luftmadrassen är fäst mot sängbotten med remmarna undertill (två vid huvudändan och två på vardera långsida).
Vissa celler har mindre luft	Detta är normalt eftersom lufttillförseln växlar mellan varannan cell under en bestämd cykeltid (en cykel = 10-25 minuter beroende på inställning).
Pumpen låter, vibrationer känns	Kontrollera pumpens upphängning på sängen. Resonans i eller sängens delar kan uppstå. Ta bort pumpen och lyssna om det blir skillnad. Kan åtgärdas genom att ställa pumpen på ett plant underlag eller lägga till exempel en handduk mellan pump och säng.
Om Dina frågor inte besvaras av ovanstående information, vänligen kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.	

## 9. Teknisk beskrivning

### 9.1 Teknisk specifikation

PUMP		SPECIFIKATION
Modell		CuroCell® Vari
Spänning		220V-240 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning		0.07 A
Säkringstyp		T1AL, 250 V
Cykeltid		Variabel, 10, 15, 20 eller 25 min
Dimension (LxBxH)		29.1 x 20 x 11.7 cm
Vikt		2.2 kg
Omgivande miljö	Temperatur	Drift: 10°C - 40°C Förvaring: -15°C - 50°C
		Frakt: -15°C - 70°C
	Fuktighet	Drift: 10% - 90% icke kondenserande Förvaring: 10% - 90% icke kondenserande
	Atmosfärstryck	700hPa-1060hPa
Klassificering		Klass II, Typ BF, IP41
MADRASS		SPECIFIKATION
Modell		CuroCell® 4 AD
Dimension (BxLxH)		80/85/90/105/120x200/210x21 cm
Vikt		10.5 kg (85x200x21 cm)

**OBS!** Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst modifiera specifikationen för produkten.

#### **WARNING!**

Följ drifts- och underhållsanvisningarna noggrant för att förebygga såväl personsador som skador på produkten eller annan utrustning.

### 9.2 Märkning

Madrasen är bland annat märkt med produktnamn, artikelnummer, tillverkningsdatum, storlek, EAN-nummer samt skötsel- och tvättråd. Har också upp/ner- och huvud/fot anvisningar. Även ruta för egen märkning finns på madrassen (till exempel avdelningsnummer och namn).

### 9.3 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Fotplacering



Läs bruksanvisningen



Funktionsgrupp



CE-märkt enligt  
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Kastas ej i hushållsavfall, följ  
instruktioner för återvinning



Rekommenderad brukarvikt



Brukarinformation - kategori



Placeras direkt  
på sängbotten



Motverkar skjuv



Hälfunktion



Tål ej maskintvätt



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



CL  
<1%  
Klor



Torktumling



Ej torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning



Klass II utrustning  
(Dubbelisolerad)




Typ BF



IP-klassning



Temperaturområde

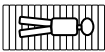

Madrasen ska användas  
med brukaren liggande i  
längsgående riktning



## 10. Reservdelar

Toppdel Olivia, grå

Art.nr	Storlek
CC-906911	80x200 cm
CC-906912	80x210 cm
CC-906913	85x200 cm
CC-906914	85x210 cm
CC-906916	90x200 cm
CC-906917	90x210 cm
CC-906910	105x200 cm
CC-906920	120x200 cm

Underdel CuroCell, Svart

Art.nr	Storlek
CC-905511	80x200 cm
CC-905512	80x210 cm
CC-905513	85x200 cm
CC-905531	85x210 cm
CC-905516	90x200 cm
CC-905517	90x210 cm
CC-905510	105x200 cm
CC-905520	120x200 cm

Art.nr	Namn	Storlek
CC-901310	Cell, PU	80x21 cm
CC-901311	Cell, PU	85x21 cm
CC-901312	Cell, PU	90x21 cm
CC-901313	Cell, PU	105x21 cm
CC-901314	Cell, PU	120x21 cm

Art.nr	Namn	Storlek
CC-901330	Hälcell, PU	80x21 cm
CC-901331	Hälcell, PU	85x21 cm
CC-901332	Hälcell, PU	90x21 cm
CC-901333	Hälcell, PU	105x21 cm
CC-901334	Hälcell, PU	120x21 cm

Vid beställning av ventilerad cell uppges detta vid beställningen.

CC-821 Säkring, (2-pack)

CC-8202 Filter, engångs

Vid behov av andra reservdelar, vänligen kontakta Care of Sweden.

## 11. Tillval och tillbehör

### 11.1 Tillval

#### Distanstyg

Till brukare som är väldigt känsliga för luftväxlingarna kan ett distanstyg väljas, vilket ytterligare höjer komforten i madrassen.

#### Hälfunktion

För att avlasta känsliga hälar finns två alternativ tillgängliga. Tömning av celler med backventiler eller lägre celler. **OBS!** Val av alternativ kan endast göras vid nybeställning.

#### Kabelhållare

En ficka längs madrassens ena långsida som håller nätsladden på plats för att minimera risken för fall på grund av sladden, samt att sladden fastnar under sängens hjul. **OBS!** Kan enbart fås vid nybeställning.

#### Lakanshållare

Ett hjälpmedel för att hålla lakanet på plats. Ett spänne sätts fast i överdraget, sex stycken per madrass.

#### Kraftig transportväska

Transport- och förvaringsväska.

## 11.2 Tillbehör

Toppdel CuroCell LF (lågfriktion)

Art.nr	Storlek
CC-916210	80x200 cm
CC-916211	80x210 cm
CC-916212	85x200 cm
CC-916213	85x210 cm
CC-916214	90x200 cm
CC-916215	90x210 cm
CC-916216	105x200 cm
CC-916218	120x200 cm

CuroCell Distanstyg

Art.nr	Storlek
CC-907411	80x200 cm
CC-907412	80x210 cm
CC-907413	85x200 cm
CC-907410	85x210 cm
CC-907415	90x200 cm
CC-907416	90x210 cm
CC-907430	105x200 cm
CC-907440	120x200 cm

Toppdel CuroCell LF (lågfriktion) - Överdrag med ökad "glid"- funktion, till ex: tunga, orörliga brukare.

Art.nr	Benämning och storlek
CC-900220	Hälfunktion med ventil (4 celler)
CC-900222	Hälfunktion med ventil (3 celler)
CC-9094	Transportväska (80-90 cm)
CC-9075	Lakanshållare CuroCell® (en styck)

## 11.3 Övriga tillbehör

För bästa komfort rekommenderar vi användning av tillbehör från Care of Sweden eftersom våra produkter är anpassade till att fungera väl ihop. Vid behov av tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden eller gå in på vår hemsida - [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se).

## 12. Garanti

### 12.1 Omfattning

Detta CuroCell®-system omfattas av 2 års garanti avseende tillverkningsfel. Garantin gäller inte normal förslitning eller vid skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering och skötsel.

### 12.2 Service och underhåll

CuroCell® växeltrycksmadrass är en medicinteknisk produkt, enligt MDD 93/42/EEC, som ska användas förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Därför rekommenderas att pumpen regelbundet lämnas in för service och kontroll, så att dess funktion och prestanda bibehålls (läs om Årsservice nedan). En välskött pump arbetar bättre och håller längre, precis som andra tekniska apparater.

Vid en Årsservice blir pumpen grundligt kontrollerad och servad av vår serviceavdelning. Filter och förslitningsdelar rengörs/byts vid behov. Kontakta Care of Sweden för mer information.

Service och underhåll ska alltid utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad tekniker. Endast reservdelar godkända av producenten får användas. Användning av icke godkända reservdelar omintetgör garantin.

Fel eller brister som betecknas som garantifel åtgärdas utan kostnad. Reklamation ska anmälas till Care of Sweden innan en produkt eventuellt återsänds.

### **12.3 Livslängd**

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år.

## **13. Övrig information**

### **13.1 Demontering och källsortering**

Nästan allt material i CuroCell® produkterna, undantaget vissa delar i pumparna, kan energiåtervinnas genom förbränning vid därför avsedda förbränningsanläggningar.

**Pump:**

Förbrukad CuroCell® pump ska ej tas isär, utan lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Elektronikavfall".

**Madrass:**

Förbrukad CuroCell® madrass lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Brännbart" avfall.

För mer information kontakta Care of Sweden.

### **13.2 Rekonditionering – Service – Reparation**

Kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad serviceenhet vid behov av service eller reparation. Beskriv felet/problemet innan produkten eventuellt återsänds.

Telefon måndag till fredag klockan 8.00 - 16.30: 0771-106 600

Telefon vid akuta ärenden, efter kontorstid (vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)

Tel:	0325-101 11
Fax:	0325-128 40
E-post:	service@careofsweden.se

### **13.3 Retur/reklamation**

Kontakta Care of Sweden **innan** produkten eventuellt återsänds. Vid fel som faller under produktgarantin bekostas returfrakten av Care of Sweden, i annat fall av kunden.



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

**Kontakt:**

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se)

Internet: [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

**Akuta ärenden, efter kontorstid  
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

**Postadress:**

Care of Sweden AB

Box 146

514 23 Tranemo

**Besöksadress:**

Fabriksgatan 5A

514 33 Tranemo

**Godsadress:**

Byns väg 4A

514 33 Tranemo