

# Curera® Stödkil

För positionering & lägesändring



 **curera**™  
positionering

 care of sweden  
SUPPORTING LIFE

# Curera® Stödkil

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till stor hjälp vid omläggning och skötsel.

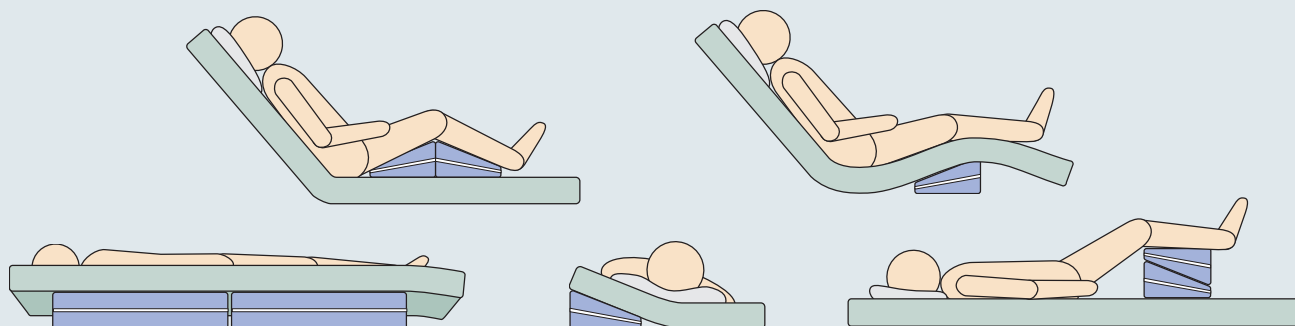
Curera® Stödkil kan användas för placering av patient/brukare i sidoläge för att lindra korsbenet, vilket är ett extra känsligt område. För sidoläge, används två stödkilar tillsammans.



Stödkilen levereras med ett hygienöverdrag. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Stödkilarna placeras olika beroende på vilken madrass som används, se bruksanvisning för mer information.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt och vinningen stor. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.

## EXEMPEL PÅ POSITIONERING



RENGÖRING	FAKTA
Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Storlek:</b> 70x26x15/5, 50x26x15/5 cm</li><li>• <b>Fyllning:</b> 100 % kallskum</li><li>• <b>Hygienöverdrag:</b> Polyuretan/polyester</li><li>• <b>Garanti:</b> 1 år</li></ul>
EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING	
<ul style="list-style-type: none"><li>• För att avlasta i trycksårspåbyggande syfte</li><li>• När brukaren har svårt att ligga helt på sidan</li><li>• När brukaren själv har svårt att ändra viloläge</li><li>• Som sparkskydd mot sänggrindar</li></ul>	  Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-04-11.