


Curera[®] Mjuksits

För ökad komfort

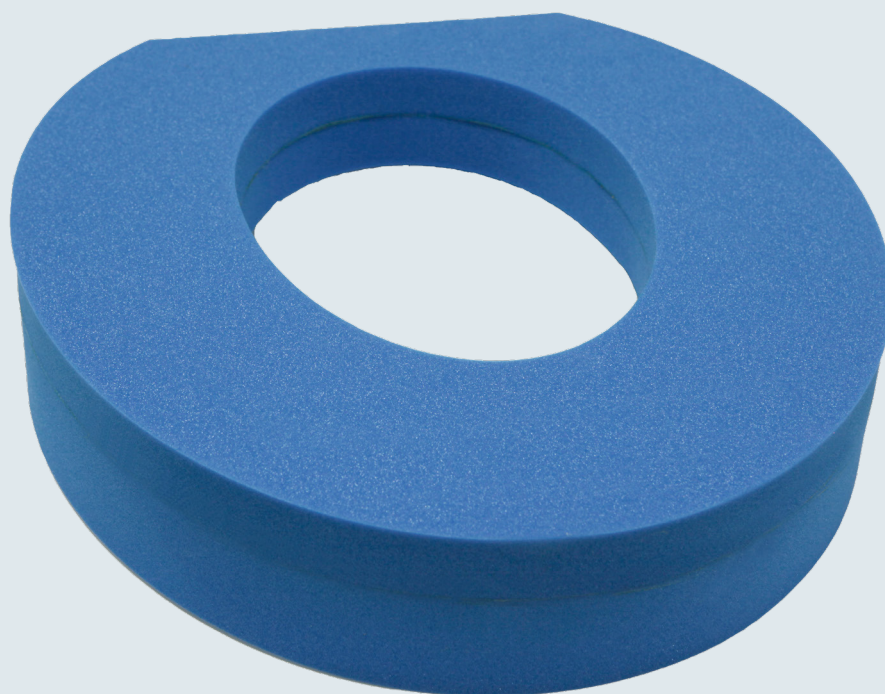

Mjuksits

Toalettsits mjuk är avsedd att användas på toalettstol eller som fristående toalettstolsförhöjare för ökad sittkomfort. Toalettjuksitsen är vattentät och kan rengöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel.

Toalettsits mjuk placeras ovanpå sittringen/toalettstolsförhöjaren, fast eller fristående med toalettstolslocket uppfällt. OBS! Toalettstolslocket kan inte fällas ned då mjuksitsen är placerad på toalettstolen.

Packa upp mjuksitsen. Placera mjuksitsen ovanpå sittringen med stänkskyddskanterna nedåt och med den raka bakkanten bakåt.

Rengör mjuksitsen med jämna mellanrum, använd desinfektions- och/eller rengöringsmedel som DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Spola av mjuksitsen och torka innan användning.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjödes. Senast uppdaterad: 2019-12-11

RENGÖRING	FAKTA
Kan torkas av med milt rengöringsmedel (till exempel hand-diskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengörings-medel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedelns bruksanvisningar noggrant.	<ul style="list-style-type: none">• Material: 100 % Polyeter• Mått (hål): 247 x 205 mm• Garanti: 1 år• Emballage: 1 % PELD 04• Destruktion: Sorteras som brännbart material