

**Bruksanvisning**

2018-11-12

## Optimal Evakueringslakan

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001007



## Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Introduktion	3
Produktbeskrivning och prestanda	5
Uppackning och installation	6
Rengöring	6
Övrig information	7

## VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

### VARNING!

1. Bär aldrig madrass och brukare med hjälp av evakueringslakanet.
2. Använd aldrig evakueringslakanet utan madrass.
3. Evakueringslakanet skall placeras under madrassen och fästas i madrassen med resårbanden i hörnen.
4. Det är viktigt att rätt sida är ner på evakueringslakanet, tydlig märkning finns på produkten.
5. I kontakt med brand- eller värmekällor, såsom eld, brinnande cigarett eller varm lampa, kan produkten skadas och därmed få försämrad funktion.
6. Madrassen skall vara av sådan kvalitet att den klarar belastning för person som ligger i, annars föreligger risk för personskada.

# 1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

## 1.1 Allmän information

Detta evakueringslakan är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Uppfyller även applicerbara standarder enligt det medicintekniska direktivet. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Produkten har testats och godkänts enligt följande standarder: SS 876 00 39, SS 876 00 01, EN 597-1,-2, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, SS EN ISO 12952-1-2.

## 1.2 Avsedd användning

Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande personer utom fara, det kan även användas vid evakuering i trappor.

Det är ergonomiskt utformat och tillverkas i mycket starka material som glider bra på både vått och torrt underlag. Det är även utrustat med handtag för sidoförflyttning.

## 1.3 Övrig information

### Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av våra produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.


### Madrassguide

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av produkter från Care of Sweden. Denna information kan hämtas från vår hemsida [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se) eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter sista sidan.

## 1.4 Evakueringsinstruktion

Vid brand eller en annan nödsituation finns inte tid till att tänka efter. Det är därför mycket viktigt att säkerhetsutrustning, såväl som utrymningsrutiner, är väl planerade och kända på förhand.

Optimal Evakueringslakan är utrustat med tre handtag på kortsidorna. På långsidorna finns utdragbara kardborrband för snabb fixering av brukare innan evakuering. Lakanet har resårband att spänna över madrassens hörn.

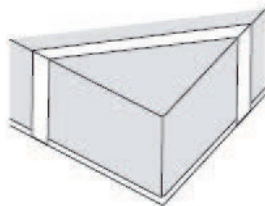



### Varning!

Person som skall utföra en evakuering måste ha tillbörlig utbildning. Kontrollera alltid utrustning före en evakuering, för att säkerställa att en evakuering kan utföras säkert.

## HANDHAVANDE VID EVAKUERING

### Ned från säng

- Informera brukaren kort om vad som skall ske.
- Sänk och lås fast sängen.
- Dra ut och fäst ihop kardborrbanden så att madrassen bildar en "tub".
- Armarna innanför banden.
- Ta tag i de yttre handtagen i fotänden och vrid ut madrassen.
- Dra långsamt ned brukaren på golvet.

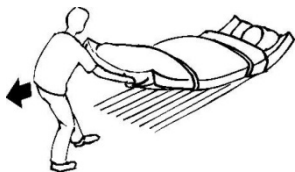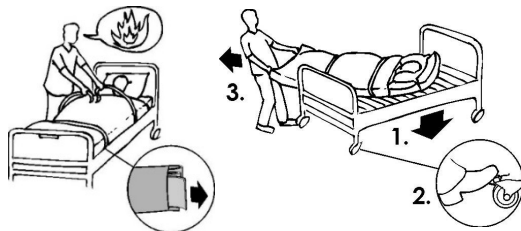

### Drag på plant underlag

- Dra i de yttre handtagen i fotänden.
- Arbetsställningen skall vara något bakåtlutad.

### Ned för trappa

- Gå baklänges nedåt tills större delen av madrassen glidit över första trappsteget.
- Vänd dig med ryggen mot brukaren och titta i färdriktningen.
- Håll i trappräcket med ena handen och i mittersta handtaget med den andra.
- Gå ner för trappan. Det är viktigt att fartkontroll bibehålls. Detta är den svåraste delen i evakueringen och bör genomföras med stor försiktighet och endast av personer som övat innan.



**Kolla upp aktuell evakueringsväg för din/er avdelning och öva där!**

## TRÄNING / ÖVNING

Att tänka på vid praktisk träning och övning med evakueringslakan.

Drag ned från säng:

- Personen som ligger i sängen bör ej ligga högst upp vid sängens huvudände - risk för att huvudet slår i sängkanten vid neddragningen.

Drag i trappor:

- Börja med att dra evakueringslakan med madrass utan någon person liggande i för att lära in tekniken.
- Vid träning med person liggande på madrassen kan ett kraftigt snöre/band dras igenom handtagen i huvudändan. En person går bakom och kan snabbt hjälpa dragaren om problem uppstår.

- Öva helst i samma trappa som en verklig evakuering kan komma att genomföras i.

Allmänt:

- Huvudsyftet med träningen är inte att få så hög hastighet som möjligt, utan att lära in tekniken.

### **Tränings-/övningslakan**

På grund av den hårda belastningen vid träning av evakuering skall handtag och sömmar kollas efter övningens slut. Vi rekommenderar att ett uppmärkt "Övningslakan" används, som endast är avsett för övning.

### **Madrassens beskaffenhet**

Madrassen skall vara av sådan kvalitet att den klarar belastningen för person som ligger på, annars föreligger risk för personskada.

### **Förklaringar**

- Drag i fotändan ned från sängen gör att "röjning" kring huvudändan ej behövs.
- Om kardborrbanden ej används finns risk för att brukaren glider/rollar av madrassen.
- Drag i fotändan minskar belastningen på dragaren, vilket innebär att man drar snabbare och orkar mer.
- Drag nedför trappor är den svåraste delen i evakueringen och bör övas extra noga.
- Armarna på brukaren skall vara innanför kardborrbanden, då detta minskar risken att brukaren greppar tag i något på grund av rädsla.

Care of Sweden har tagit fram en instruktions-DVD för evakuering. Denna går att beställa på telefon 0771-106 600.

## **2 Produktbeskrivning och prestanda**

Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande personer utom fara, kan även användas vid evakuering i trappor.

Optimal Evakueringslakan placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med resårband. Det är lätt att bädda in och finns i flera storlekar för att passa de flesta madrasser. Det är ergonomiskt utformat och tillverkas i mycket starka material som glider bra på både vått och torrt underlag. Det är även utrustat med handtag för sidoförflyttning.

Ett enkelt och säkert hjälpmedel för evakuering. Uppfyller kraven i svensk standard (SS 876 00 39) för räddningslakan.

Material: Polyamid/polyester

Garanti: 2 år


## 3 Uppackning och installation

### 3.1 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

### 3.2 Installation

- Evakueringslakanet som är liksidigt (ingen fot- eller huvudände) placeras under madrassen.
- Lakanet är märkt med "denna sida upp".
- Spänn de fyra resårbanden över madrasshörnen (se bild till höger).
- Nu är evakueringslakanet i beredskapsläge.

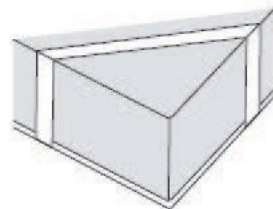

## 4 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller leverantören för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

- Evakueringslakanet kan torkas av med ett mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.
- Maskintvätt 95 °C.
- Kan torktumlas.
- Vid tvätt fästs kardborrebanden mot varandra.
- Varje lakan är märkt med tvättråd.



#### **NOTERA!**

Kontrollera evakueringslakanet vid varje rengöring. Är det skadat skall det lagas eller bytas ut.

## 5 Övrig information

### 5.1 Förvaring

Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme. Undvik att utsätta evakueringslakanet för direkt solljus.

### 5.2 Märkning

Evakueringslakanet är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer. Märkt med denna sida upp. Även en ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn).

### 5.3 Garanti

Evakueringslakanet omfattas av 2 års garanti. Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

### 5.4 Service och underhåll

Evakueringslakanet kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

### 5.5 Livslängd

Beräknad livslängd för denna produkt är 3 år.

### 5.6 Demontering och källsortering

Alla bäddprodukter är helt återvinningsbara och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

### 5.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

### 5.8 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt  
MDD 93/42/EEC



Återvinning



<1%  
Klor



Avtorkning



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

**Kontakt:**

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se)

Internet: [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

**Akuta ärenden, efter kontorstid  
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00):**

Telefon: 0325-101 11

**Postadress:**

Care of Sweden AB  
Box 146  
514 23 Tranemo

**Besöksadress:**

Fabriksgatan 5A  
514 33 Tranemo

**Godsadress:**

Byns väg 4A  
514 33 Tranemo

Care of Sweden är varumärke som tillhör Care of Sweden AB

© Care of Sweden AB, 2018