

Bruksanvisning

2018-11-16

Optimal Hygienkudde & Optimal Sens

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001025



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Introduktion	3
Rengöring	4
Övrig information	5
Egna noteringar	6

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
3. Produkten är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
4. Undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med produkten. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Optimal Hygienkudde och Optimal Sens är medicintekniska produkter och CE-märkt enligt MDD 93/42 EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Produkterna uppfyller tillämpliga delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952-1, EN 14126.

1.2 Avsedd användning

Optimal Hygienkuddar är utvecklade för vårdens behov men passar även bra i hemmiljö.

1.3 Produktbeskrivning

OPTIMAL HYGIENKUDDE

Optimal Hygienkudde är en kudde av hög kvalitet och god komfort, med fyllning av bollfiber.

Fyllning: Polyester/bollfiber

Överdrag Optimal kuddskydd: Polyuretanbelagd polyesterväv

Storlekar: 35x45, 50x60, 50x70 cm

Garanti: 1 år

OPTIMAL SENS

Optimal Sens är en högkvalitativ, anatomisk sovkudd som utformats enligt ergonomiska principer som stöd för huvud och nacke.

Fyllning: Viskoelastiskt trögsaum

Överdrag: Polyuretanbelagd polyesterväv

Storlek: 30x48x11/9 cm

Garanti: 1 år

1.4 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madrassguide

Denna guide ger dig som personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

1.5 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

2 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller leverantören för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

HYGIENÖVERDRAG



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdraget kan maskintvättas i max 95 °C, torktumlas, alternativt droptorkas.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

KUDDE



Kudde Twill kan maskintvättas i max 60 °C, torktumlas, alternativt droptorkas.



Hygienöverdraget innesluter och skyddar kudden helt så att rengöring av denna sällan blir nödvändig. Om Optimal Sens-kudden trots allt skulle bli smutsig, rengör det smutsiga partiet med ett mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten (till exempel duscha).

Pressa sedan ur vattnet varsamt. OBS vrid eller rulla ej skumkärnan för att få ut vattnet. Låt kärnan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Kärnan skall vara helt torr innan den tas i bruk igen. Använd vid behov alkoholbaserat desinfektionsmedel.

Viktigt!

Kontrollera hygienöverdraget vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut.

3 Övrig information

3.1 Garanti

Denna produkt omfattas av 1 års garanti. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering/skötsel.

3.2 Livslängd

Beräknad livslängd för denna produkt är 2 år.

3.3 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och ska källsorteras som 'brännbart avfall'. Ingen demontering är nödvändig.

3.4 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

3.5 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Maskintvätt 60 °C



Maskintvätt 95 °C



<1%
Klor



Torktumling



Torktumling låg
temperatur



Dropptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00):**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo

Care of Sweden är varumärke som tillhör Care of Sweden AB

© Care of Sweden AB, 2018