

Bruksanvisning

2019-09-27

CuroCell® S.A.C.

Sittdyna

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001252



7 331345 031743



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Produktbeskrivning	4
Handhavande	4
Rengöring	5
Övrig information	6
Tillbehör	7

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Care of Sweden AB.
2. Om dynan är skyddad med hygienöverdrag, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
3. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
4. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad.
5. Om dynan har utsatts för höga temperaturer, exempelvis förvarats i direkt solsken, skall man före användning kontrollera så att den inte är för varm att sitta på.
6. Kontrollera alltid att dynan har avsedd storlek.
7. Före användning skall dynan alltid kontrolleras så att den inte är skadad samt att den är luftfylld enligt punkterna 3.2 och 3.4
8. Undvik skador från vassa föremål.
9. Långvarigt stillasittande ökar risken för DVT (djup ventrombos).
10. Kontrollera regelbundet huden för rodnad. Om rodnaden uppkommer sluta omedelbart använda dynan, kontakta ordnatören.
11. Dynan är avsedd att användas i rullstol eller stol med rygg och armstöd. Vid användning i rullstol med hängsits finns utjämningsplatta som tillbehör.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna dyna är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden AB.

1.2 Avsedd användning

CuroCell® S.A.C. är en statisk sittdyna som erbjuder bra komfort och tryckutjämning. Den är avsedd för användning i rullstol för att förebygga trycksår och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, men kan även användas i andra sittmöbler.

Rekommenderad max brukarvikt är 160 kg.

Rengöring av dynan ska ske mellan varje brukare.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.3 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av denna produkt rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter. Denna information kan hämtas från vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst. Se kontaktuppgifter på sista sidan.

2 Produktbeskrivning

Produktbeskrivning

CuroCell® S.A.C.

CuroCell® S.A.C.

Storlek

45x45x5 cm

50x50x5 cm

Art.Nr

CC-710-045045

CC-710-050050

Material: Polyuretan

Klassificering: ISO-kod 04 33 03 – Tryckavlastande

Brand: SS 876 00 01, EN 597-1, EN 597-2

3 Handhavande

3.1 Uppackning

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

3.2 Kontroll av dynan innan användning

Kontroll av att dynan har rätt mängd luft görs genom att man rullar dynan från en sida och dynan skall kunna rullas upp till andra raden med hålen.

3.3 Användning

Nu är produkten klar att användas. Placera dynan på underlaget där den skall användas. Kontroll av funktionen görs enligt pkt 3.4.

Vid användning i en rullstol med hängsits finns en utjämningsplatta (tillbehör).

3.4 Funktionskontroll

Kontroll av dynans funktion vid användning görs genom handcheck. Det vill säga att man sticker in handen mellan underlaget och dynan för att kontrollera att brukaren inte sitter genom.

4 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

NOTERA!

Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlets bruksanvisning noggrant.

Dynan



Torka av dynan med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.

Hygienöverdrag (tillbehör)



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten. Vid behov används ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom alkohol med/utan tensider, oxiderande lösningar, klor 1 % eller Isopropanol 70 %.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

Viktigt!

Kontrollera dynan vid varje rengöring. Är den skadad skall den bytas ut.

Låt dynan torka torrt i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den ska vara helt torr innan den tas i bruk igen.

5 Övrig information

5.1 Förvaring

Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme. Undvik att utsätta dynan för direkt solljus.

5.2 Märkning

Produkten är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer.

5.3 Garanti

Denna produkt omfattas av 1 års garanti. Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

5.4 Service och underhåll

Produkten kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

5.5 Livslängd

Beräknad livslängd för denna produkt är 1 år.

5.6 Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

5.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

5.8 Tillval och tillbehör

Beskrivning	Storlek	Art. Nr
Hygienöverdrag, CuroCell® S.A.C.	45x45x5 cm	CC-711-045045
Hygienöverdrag, CuroCell® S.A.C.	50x50x5 cm	CC-711-050050

5.9 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Rekommenderad
brukarvikt



Tål ej vattentvätt



<1%
Klor



Avtorkning

6 Tillbehör

Utjämningsplatta

Vid behov av att utjämna sittytan. Det är en iläggsskiva som placeras under dynan.



Vid behov av andra tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden på 0771-106 600 eller gå in på vår hemsida – www.careofsweden.se.



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00):**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo