

## Bruksanvisning

2019-03-13

## Ekerskydd



Artikelnummer bruksanvisning: 97-001019



## **Innehållsförteckning**

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Produktbeskrivning och prestanda	5
Monteringsanvisning	5
Rekonditionering	6
Övrig information	6

# VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

## VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad.
4. Kontrollera alltid att ekerskyddet har avsedd storlek.
5. Före användning skall ekerskyddet alltid kontrolleras så att den inte är skadad.
6. Vid behov kan ekerskyddet anpassas till olika hjul genom att man klipper/skär i materialet. Nya hål kan i så fall behöva borrar. Vid en eventuell anpassning är det ordinarieansvar att säkerställa så att inga vassa kanter finns kvar som kan skada brukare eller personal.

# 1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

## 1.1 Allmän information

Detta ekerskydd är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

## 1.2 Avsedd användning

Ekerskyddet används som ett tillbehör till rullstolar där huvudanvändningsområden är att skydda händer från att fastna i ekrar vid körning, samt hålla ekrar och nav fria från smuts.

# 2 Produktbeskrivning och prestanda

Utformningen på ekerskyddet möjliggör att produkten passar rullstolar med både 4 och 6 drivringsfästen samt med eller utan vårdarbroms.

Ekerskyddet finns i följande storlekar 20/22/24/26 tum.

Alla storlekar går att beställa med 3 olika mått på centrumhål: 0/80/120 mm



Centrumhål 0 mm



Centrumhål 80 mm




Centrumhål 120 mm

Produkt	Centrumhål	Artikelnummer
Ekerskydd 20"	0 mm	950020-30
Ekerskydd 20"	80 mm	950020-50
Ekerskydd 20"	120 mm	950020-70
Ekerskydd 22"	0 mm	950022-30
Ekerskydd 22"	80 mm	950022-50
Ekerskydd 22"	120 mm	950022-70
Ekerskydd 24"	0 mm	950024-30
Ekerskydd 24"	80 mm	950024-50
Ekerskydd 24"	120 mm	950024-70

### 3 Monteringsanvisning

1. Placera ekerskyddet mot ekrarna på hjulets utsida, säkerställ även att förhöjningen på ekerskyddet är riktad ut från hjulet.
2. Se till så att de utstansade hålen på ekerskyddets ytterkant ligger riktade mot eventuella drivningsfästen, rotera annars ekerhjulet till rätt position.
3. Fäst ekerskyddet med buntband i de förborrade hålen. Ekerskyddet ska spännas med fyra fästpunkter. För att inte riskera eventuella skador vid användning så rekommenderar vi att montera buntbanden från hjulets insida, så att buntbandets låshuvud inte kommer på utsidan.

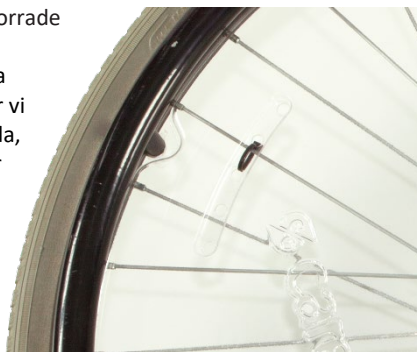

## 4 Rekonditionering

### NOTERA!

Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlets bruksanvisning noggrant.



Ekerskydden kan torkas av med ett mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten.



Vid behov används ett desinfektionsmedel och/eller rengöringsmedel, såsom alkohol med eller utan tensider, oxiderande lösningar, Klorin max 1 %, Isopropanol 70 %, eller väteperoxid max 1,5 %.

Ekerskyddet klarar även av att rekonditioneras i tvättkabinett av den typen som förekommer i hjälpmedelshantering i 60 grader upp till 10 minuter.

## 5 Övrig information

### 5.1 Garanti

Ekerskyddet har 1 års garanti.

Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

### 5.2 Service och underhåll

Ekerskyddet kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

### 5.3 Material

Polyester

### 5.4 Källsortering

Denna produkt återvinningsbar. Sorteras som hård plast.



### 5.5 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

## 5.6 Symbolförklaring



Artikelnummer

XXXX-XX-XX

År-Månad-dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt  
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Tillverkare



Avtorkning



Klor



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

**Kontakt:**

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se)

Internet: [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)

**Akuta ärenden, efter kontorstid  
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

**Postadress:**

Care of Sweden AB  
Box 146  
514 23 Tranemo

**Besöksadress:**

Fabriksgatan 5A  
514 33 Tranemo

**Godsadress:**

Byns väg 4A  
514 33 Tranemo