



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09

Snabbinstruktion

CuroCell® 4



7 331345 007816

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001041

 **OBS!** Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera luftmadrassen direkt på sängbotten och spänn om möjligt fast den mot sängens rörliga delar. Notera fotändan.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotändan och justera byglarna eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen. När ett "klick" hörs eller känns är snabbkopplingarna rätt hopsatta.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på "0" (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på "1" (på).
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 8 nedan. Inställt tryck uppnås efter cirka 20-30 minuter och då tänds den gröna lampan "NORMAL PRESSURE".
7. Madrassen är nu klar att användas.

Funktion

8. **Viktinställning**
Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8). Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.
9. **Kontroll av inställt tryck, Hand check**
Stick in en hand mellan två celler under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottnar, utan har marginal kvar till botten. Vi rekommenderar två till tre fingrars marginal. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-

200 kg. Madrassen ska användas med brukaren liggande i längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

10. Statiskt läge

Använd "static-knappen" vid omvårdnadsarbete lägesändring/förflyttning i och ur säng. Detta gör att cellerna inte växlar, vilket underlättar för personal och brukare. Pumpen går automatiskt tillbaka till växlingsläge efter 30 minuter.

11. CPR

Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump, (CPR-bandet kan finnas vid fotändan eller huvudändan) lossa därefter slangarna från pumpen.

12. Alarm – lågt tryck

Om lufttrycket skulle sjunka tänds den gula lampan "LOW PRESSURE" och en larmsignal ljuder i cirka 30 sekunder (kan även stängas av med knappen "ALARM OFF". Ljudlarmet återaktiveras efter tre minuter om inte trycket återgått till det normala. Kontrollera först CPR-ventilen, sedan kopplingar och slangar. Den gula lampan slocknar när lufttrycket är normalt igen. **OBS!** Vid uppstigning från madrassen kan pumpen i vissa fall larma på grund av den plötsliga tryckminskningen inuti cellerna.

13. Transportläge (vid förflyttning i säng)

Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 24 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11