



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2019/04

Snabbinstruktion

CuroCell® A4



Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001433-SE0000



OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen.

Installation & start

Vid användning av bäddmadrass (CuroCell® OP10 eller CuroCell® CX10):

1a. Placera madrassen på basmadrassen. Fäst madrassen i basmadrassen genom att använda resårbanden som finns i madrassens fyra hörn.

Vid användning av ersättningsmadrass (CuroCell® CX16 eller CuroCell® CX20):

1b. Placera madrassen på sängbotten. Fäst madrassen mot sängen (i sängens rörliga delar) genom att använda fästbanden som är placerade på underdelen av madrassen.

2. Häng kontrollenheten på sänggaveln vid fotändan eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.


3. Öppna locket till slanganslutningen (märkt med 'CPR') och anslut den till sidan av kontrollenheten.

4. Ett 'klick' hörs och känns när slangarna är korrekt anslutna. Säkerställ att båda sidor av anslutningen är stängda.

5. Ställ strömbrytaren på sidan av kontrollenheten på "0" (av). Anslut elsladden till ett uttag.


6. Starta kontrollenheten genom att trycka på "1" (på).

7. Madrassen börjar fyllas. Detta tar cirka 20-25 minuter.

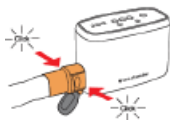


Under tiden madrassen fylls lyser "mute-knappen" och varningssymbolen med ett orange sken. När dessa dioder slocknat kan brukaren placeras på madrassen.

När brukaren placerats på madrassen genomför systemet en automatisk inställning för att anpassa trycket efter brukarens vikt, längd, läge och position. Lampan ovanför det valda programmet blinkar med ett grönt sken under tiden madrassen anpassar inställningarna.

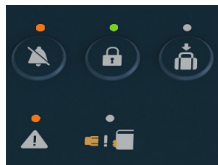

Systemet är utvecklat för att erbjuda en hög nivå av komfort med lugna och stabila luftflöden i madrassen. Därför tar det i regel 20-30 minuter för systemet att anpassa sig efter brukaren. När lampan ovanför valt program lyser konstant har madrassen ställt in sig och anpassat trycket.

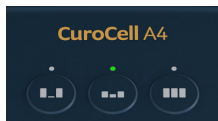

Funktion

8. Program

Alternierande läge  Pulserande läge (förinställt vid start) 

Konstant lågt tryck 

9. Informationssignal av

Tystar informationssignal.

10. Knapplåås

Låser eller låser upp kontrollpanelen. Knappen lyser när panelen är låst. Kontrollpanelen låses automatiskt efter fem minuter.

11. Pack & Go

Automatisk tömning av systemet. Tömningen tar cirka 20 minuter.

12. Maximalt tryck (omvårdnadsläge)

Hela madrassen fylls och ger ett fast stöd. Övergår automatiskt till föregående inställning efter 20 minuter.

13. Cykeltidsinställning 10 15 20 25

Välj mellan 10, 15, 20 eller 25 minuter. Lamporna tänds även vid eventuella fel, för mer information om felkoder, se kapitel 'Notifieringar' i bruksanvisningen.

14. Komfortinställning 0 +1 +2

Trycket kan ökas i två steg utifrån brukarens önskemål om komfort.

15. CPR med inbyggd transportfunktion

Snabbtömning av luft för att utföra HLR (hjärt- & lungräddning). Koppla bort anslutningen från kontrollenheten och låt locket vara öppet. För transportfunktion: Koppla ur CPR-anslutningen från kontrollenheten och stäng locket. Madrassen kommer att behålla luften i minst 12 timmar.

Fel/problem

Se kapitel "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00): 0325-101 11