

2017/09

Snabbinstruktion

CuroCell[®] AREA Zone

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Artikelnummer snabbinstruktion: XX-XXXXXX



OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Denna madrass är avsedd att användas för att förebygga trycksår och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3. Rekommenderad brukarvikt är upp till 230 kg.

Installation & start

1. Placera madrassen direkt på sängbotten.
2. Justera överdraget vid behov.
3. Vi rekommenderar att man bäddar madrassen med lakan för ökad komfort.
4. Madrassen är nu klar att användas.

5. **Hand check, kontroll av madrassens inställning.**
Öppna överdragen, stick in en flat hand mellan cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte "bottnar", utan har marginal kvar till botten. Vi rekommenderar två till tre fingrars marginal.

Rengöring

Överdrag

Torka av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.

Läs bruksanvisningen för kompletterande information.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post:

info@careofsweden.se, jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11