



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09

Snabbinstruktion

CuroCell® AUTO420



7 331345 059655

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001642

 **OBS!** Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera luftmadrassen direkt på sängbotten. Fäst madrassen mot sängen (i sängens rörliga delar) med banden på madrassens undersida.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på "0" (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V).
6. Starta pumpen genom att trycka på "1" (på).
7. Madrassen börjar fyllas. Det tar ca 30 minuter.

Man kan börja använda madrassen när lampan längst upp till vänster är tänd (enbart lampan under bocken).








Funktion

8. Program

Välj mellan följande program:

- A) Växlande läge.
- B) Statiskt läge. Samma tryck i alla celler, kallas även "låg tryck".

Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt upp till 0-250 kg.

- C) Madrassen ska användas med brukaren liggande i längsgående riktning
fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.
9. **Komfortinställning** 
Trycket kan ökas eller minskas enligt brukarens önskemål om komfort.
10. **Automatisk inställning** 
Tryck in knappen för att göra en automatisk inställning.
11. **Maximalt tryck (Omvårdnadsläge)** 
Används i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttningar i och ur säng. Madrass fylls helt och ger ett fast stöd. Den övergår automatiskt till föregående inställning efter cirka 30 minuter.
12. **Panellås** 
Panelen kan låsas/låsas upp med knappen Panellås. Om panelen lämnas orörd i fem minuter, låses den automatiskt.
13. **Larm av** 
Det finns två larm, larm vid för lågt tryck och strömförsörjningslarm. Dessa avaktiveras/stängs av med "Larm av"-knappen.
14. **CPR**
Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning).
Dra i CPR-bandet och lossa slangarna från pumpen.
15. **Transportläge** (vid förflyttning i säng)
Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11