



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09

Snabbinstruktion

CuroCell® NEO CX19



7 331345 023205

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001086



OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera luftmadrassen direkt på sängbotten. Notera fotänden.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på "0" (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på "1" (på) och tryck på pumpens Power knapp.
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 8 nedan. Inställt tryck uppnås efter ca 20-30 minuter och den gröna lampan för valt läge lyser.
7. Om behovet finns kan brukaren ligga direkt på madrassen utan att denna är fylld. Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen.

Funktion

8. Viktinställning

Lämpligt lufttryck ställs in med komfortpilarna (1-10). Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.

9. Kontroll av inställt tryck, Hand check

Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottnar, utan har en till två fingrars marginal

kvar till underliggande madrass. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt, 0-160 kg.

10. Statiskt läge

Använd "static-knappen" i samband med omvårdnadsarbete lägesändringar/förflyttning i och ur säng. Detta gör att cellerna inte växlar, vilket underlättar för personal och brukare. Pumpen går automatiskt tillbaka till växlingsläge efter 20 minuter.

11. Alarm – lågt tryck

Om lufttrycket skulle sjunka tänds den gula lampan "LOW PRESSURE" och en larmsignal ljuder i cirka 30 sekunder, stängs av med knappen "ALARM MUTE". Kontrollera först CPR-ventilen, sedan kopplingar och slangar. Lampan slocknar när lufttrycket återgått till det normala. ALARM POWER FAILURE: Om pumpen saknar strömförsörjning tänds lampan "POWER FAILURE" och en larmsignal ljuder. Stängs av med knappen "ALARM MUTE".

12. CPR – snabbtömning av luft

Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump, lossa därefter slangarna från pumpen.

13. Transportläge (vid förflyttning i säng)

Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11