



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09


Snabbinstruktion

CuroCell[®] Nova




7 331345 010335

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001011


 **OBS!** Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera luftmadrassen ovanpå befintlig madrass. Notera fotändan.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotändan eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilerna är stängda.
5. Ställ pumpens strömbrytare på "0" (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på "1" (på).
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 10 nedan. Inställt tryck uppnås efter cirka 20-30 minuter. Lampan vid symbolen  lyser.
7. Om behovet finns kan brukaren ligga på madrassen utan att denna är fylld. Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen.
8. Öppna överdraget och kontrollera att tryckknapparna i varje hörn sitter fast i överdraget, att luftpaketet ligger slätt och att banden till CPR-ventilerna går igenom öppningen i överdraget. Stäng överdragets dragkedja.
9. Fäst hörnbanden runt underliggande madrass.

Funktion

10. Val av program

 = Växlande läge (läge 1,), varannan cell är uppblåst. Vi rekommenderar att detta läge används som grundinställning.

OOOOO = Statiskt läge (läge 0), detta gör att cellerna inte växlar. Används i samband med omvårdnadsarbete, lägesändring/förflyttning i och ur säng. Kan även användas som ett behandlingsläge. För att återgå till växlingsläge tryck på läge 1.

11. Komfortinställning

Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8). Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.


12. Kontroll av inställt tryck, Hand-check

Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottnar utan har en till två fingrars marginal kvar till underliggande madrass. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-150 kg. Madrassen ska användas med brukaren i liggande längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

13. CPR

Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i CPR-banden mellan madrass och pump, lossa därefter slangarna från pumpen.

14. Alarm - lågt tryck

Om lufttrycket skulle sjunka tänds lampan vid symbolen . Lampan slocknar när lufttrycket är normalt igen.

15. Transportläge (vid förflyttning i säng)

Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11