



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09

Snabbinstruktion

**CuroCell® Nova CX**




7 331345 021546

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001083


 **OBS!** Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

## Installation & start

1. Placera madrassen ovanpå befintlig madrass (CuroCell® Nova CX13) och fäst hörbanden runt underliggande madrass. Notera fotänden. Om integrerad förhöjningsdyna används läggs madrassen direkt på sängbotten (CuroCell® Nova CX19), fästs då i sängens rörliga delar.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på 0 (AV). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på 1 (PÅ).
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 8 nedan. Inställt tryck uppnås efter ca 20-30 minuter och då tänds lampan vid symbolen .
7. Om behovet finns kan brukaren ligga direkt på madrassen utan att denna är fylld. Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen. Är undermadrassen av luft måste denna vara helt fylld.

## Funktion

### 8. Val av program

 = Växlande läge (läge 1), varannan cell är uppblåst. Vi rekommenderar att detta läge används som grundinställning.

000000 = Statiskt läge (läge 0), detta gör att cellerna inte växlar. Används i samband med omvårdnadsarbete, lägesändring/förflyttning i och ur säng. Kan även användas som ett behandlingsläge. För att återgå till växlingsläge tryck på läge 1.

### 9. Komfortinställning

Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8). Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.


### 10. Kontroll av inställt tryck, Hand-check

Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottnar utan har en till två fingrars marginal kvar till underliggande madrass. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-150 kg. Madrassen ska användas med brukaren i liggande längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

### 11. CPR

Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump, lossa därefter slangarna från pumpen.

### 12. Alarm – lågt tryck

Om lufttrycket skulle sjunka, tänds lampan vid symbolen . Lampan slocknar när lufttrycket är normalt igen.

### 13. Transportläge (vid förflyttning i säng)

Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

## Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

## Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se),

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11