



care of sweden

SUPPORTING LIFE

2017/09

Snabbinstruktion

CuroCell<sup>®</sup> RAPS



7 331345 021553

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001084



**OBS!** Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

## Installation & start

1. Placera madrassen ovanpå befintlig madrass och fäst hörnbanden runt underliggande madrass. Notera fotändan. Om integrerad förhöjningsdyna används läggs madrassen direkt på sängbotten (CuroCell<sup>®</sup> RAPS CX19) fästs då i sängens rörliga delar.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotändan eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på 0 (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på 1 (på).
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 8 nedan. Inställt tryck uppnås efter cirka 20-30 minuter.
7. Om behovet finns kan brukaren ligga direkt på madrassen utan att denna är fylld. Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen. Är undermadrassen av luft måste denna vara helt fylld.

## Funktion

### 8. Viktinställning

Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8). Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.

### 9. **Kontroll av inställt tryck, Hand-check**

Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottenar utan har en till två fingrars marginal kvar till underliggande madrass. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är 0-150 kg. Madrassen ska användas med brukaren i liggande längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

### 10. **Statisk funktion**

Använd "static-knappen" vid omvårdnadsarbete lägesändring/förflyttning i och ur säng. Detta gör att cellerna inte växlar, vilket underlättar för personal och brukare. För att återgå till växlingsläge tryck på knappen Static igen.

### 11. **CPR**

Snabbtömning av luften för att utföra till exempel HLR (hjärt- och lungräddning). Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump, lossa därefter slangarna från pumpen.

### 12. **Alarm – lågt tryck**

Om lufttrycket skulle sjunka tänds den gula lampan "LOW PRESSURE" och en larmsignal ljuder, kan stängas av med knappen "ALARM OFF". Ljudlarmet återaktiveras efter tre minuter, om inte trycket återgått till det normala. Den gula lampan slocknar när lufttrycket är normalt igen.

### 13. **Transportläge** (vid förflyttning i säng)

Stäng av pumpen, lossa slangarna och koppla ihop dem.

## **Fel/problem**

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

## **Kontakt**

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

**Telefon: 0771-106 600, e-post: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se),**

**jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11**