

2017/09

Snabbinstruktion

**CuroCell S.A.M.<sup>®</sup>**

(slangset inkl. CPR)



care of sweden

SUPPORTING LIFE



7 331345 020044

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001016



**OBS!** Läs alltid bruksanvisningen  
innan användning av madrassen!

## Installation & start

1. Placera luftmadrassen ovanpå befintlig madrass.  
Notera fotänden.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt underlag. Används pumpväska (tillbehör) fästs denna på sänggaveln.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.  
Kontrollera att CPR ventilen är stängd.
4. Anslut elsladden till ett uttag (220 V).
5. Slå på strömbrytaren på pumpens högra sida så att den gröna lampan tänds.

6. Pumpen börjar nu fylla madrassen med luft. Det tar cirka 15-20 minuter innan madrassen är fylld.
7. Ställ in lämpligt tryck med komfortvredet (1-8). Riktlinjer utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.
8. **Hand check, kontroll av inställt tryck**  
Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottenar, utan har en till två fingrars marginal kvar till underliggande madrass.
9. **CPR**  
Snabbtömning av luft för att utföra till exempel HLR (hjärt-lungräddning). Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump, lossa därefter slangarna från pumpen.

## Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

## Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

**Telefon: 0771-106 600, e-post: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se),**  
jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00):  
0325-101 11