

2017/09

Snabbinstruktion

CuroCell S.A.M.[®] CF16



care of sweden

SUPPORTING LIFE



Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001059



OBS! Läs alltid bruksanvisningen
innan användning av madrassen!

Installation & uppstart

1. Placera luftmadrassen direkt på sängbotten.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ den på ett plant och stadigt underlag. Används pumpväska (tillbehör), fästs denna på sänggaveln.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
5. Ställ pumpens strömbrytare på 0 (av). Anslut elsladden till ett uttag (220 V). Starta pumpen genom att trycka på 1 (på).
6. Ställ in lämpligt lufttryck enligt punkt 7, nedan. Inställt tryck uppnås efter cirka 15-20 minuter.

Funktion

7. **Viktinställning**
Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8).
Riktvärden utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen.

8. **Kontroll av inställt tryck, Hand-check**
Öppna överdraget, stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte bottnar, utan har en till två fingrars marginal kvar till botten.
Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad brukarvikt 0-200 kg.
9. **CPR**
Snabbtömning av luft för att utföra HLR (hjärt- & lungräddning). Dra i CPR-bandet mellan madrass och pump. Lossa därefter slangarna från pumpen.
10. **Transportfunktion** (vid förflyttning i säng)
OBS! Endast om pumpen är utrustad med snabbkopplingar. Stäng av pumpen. Lossa slangarna och koppla ihop dem.

Fel/problem

Läs punkten "Felsökning" i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,
jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00):
0325-101 11

© Care of Sweden AB, 2017-09-25