



OBS FARA! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Installation & start

1. Placera madrassen ovanpå befintlig madrass och säkra genom att vika in vingarna under den underliggande madrassen.
2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden med hjälp av hänganordningen på baksidan eller ställ den på ett plant och stadigt underlag.
3. Anslut luftslangarna från madrassen till pumpen.
4. Anslut elsladden till ett uttag (220 V).
5. Slå på strömbrytaren på pumpens högra sida så att den gröna lampan tänds.

Funktion

6. Sätt på pumpen genom att trycka på av/på-knappen på höger sida av pumpen.

7. Pumpen börjar nu fylla madrassen med luft. Vrid medurs på komfortinställningsvredet för att öka fastheten/trycket i madrassen. Vrid moturs för att sänka fastheten/trycket.

NOTERA! Som normalinställning, ställ vredet rakt upp. Trycket kan sedan justeras efter brukarens önskemål.

Fel/problem

Läs punkten 'Felsökning' i bruksanvisningen. Kan felet ändå inte åtgärdas, kontakta Care of Sweden.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 158, 512 24 Svenljunga

Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,
jourtelefon: 0325-101 11 (akuta ärenden efter kontorstid)

© Care of Sweden AB, 2010-12-08