

2017/09

Snabbinstruktion

Optimal 5zon[®] BM



care of sweden

SUPPORTING LIFE



7 331345 029757

Artikelnummer snabbinstruktion: 95-001249



OBS! Läs alltid bruksanvisningen innan användning av madrassen!

Denna madrass är avsedd att användas för att förebygga trycksår och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Rekommenderad brukarvikt upp till 150 kg.

Installation & start

1. Placera madrassen ovan på en befintlig madrass av god kvalitet.
2. Rätta till överdraget.
3. Om madrassen legat rullkomprimerad bör den helst ligga upppackad (i plant läge) i cirka två timmar innan den tas i bruk.
4. Vi rekommenderar att man bäddar madrassen med lakan för ökad komfort.

5. Madrassen är nu klar att användas.

Rengöring

Överdrag

Torka av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Läs bruksanvisningen för kompletterande information.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo

Telefon: 0771-106 600, e-post:

info@careofsweden.se,

jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11

© Care of Sweden AB, 2017-09-25