



OBS! Läs alltid bruksanvisningen
innan användning av madrassen!

Rekommenderad brukarvikt upp till 130 kg.

Installation & start

1. Placera madrassen direkt på sängbotten.
2. Rätta till överdraget.
3. Om madrassen legat rullkomprimerad bör den helst ligga upppackad (i plant läge) i cirka två timmar innan den tas i bruk.
4. Vi rekommenderar att man bäddar madrassen med lakan för ökad komfort.
5. Madrassen är nu klar att användas.

Rengöring

Hygienöverdrag

Torka av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande.

Trikåöverdrag



Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.

Läs bruksanvisningen för kompletterande information.

Kontakt

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
Telefon: 0771-106 600, e-post: info@careofsweden.se,
jourtelefon (vardagar 16.30-22.00 & helger 8.00-17.00): 0325-101 11

© Care of Sweden AB, 2014-08-27