

# CuroCell® AUTO4 CX13



En ny generation CuroCell-madrasser

# CuroCell® AUTO4 CX13

CuroCell® AUTO4 CX13 används i alla typer av vårdmiljöer och är en mycket funktionell och kostnadseffektiv madrass, en bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass. Den används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4<sup>(1)</sup>.

CuroCell® AUTO4 CX13 kan användas med växlande tryck eller med statiskt lågt tryck. Pumpen, som är enkel att sköta och hantera, är också utrustad med en automatisk funktion som innebär att madrassen ställer in sig efter brukarens vikt, läge och position.

## Fakta

Typ: Växeltrycksmadrass

Höjd: 13 cm

Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4<sup>(1)</sup>

Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg

Strömförsörjning: 230 V/50 Hz

Ljudnivå pump: 27 dBA

Garanti: 2 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



## Funktioner och egenskaper

- CPR-funktion - snabbtömning av luft vid HLR
- Digital pump med automatisk funktion
- Larm vid strömbrott
- Ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck
- Statisk funktion
- Transportfunktion
- Tyst och energisnål pump
- Utbytbara celler

CuroCell® AUTO4 CX13 har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.

Den levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>.

CuroCell® AUTO4 CX13 tillverkas av moderna, återvinningsbara material som uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

## Storlekar

80/85/90/105/120x200 cm & 80/85/90x210 cm.

Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.

## Tillval

- Hälfunktion
- Kraftig transportväska
- Överdrag med svetsade sömmar

## Referenser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2016-11-23.



### Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

[www.careofsweden.se/madrassvaljaren](http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren)

 care of sweden  
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo  
0771-106 600 | [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se) | [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)