

# CuroCell® AUTO4 CX13

Funktionell bäddmadrass med automatisk pump



CuroCell® AUTO4 CX13 med överdrag Olivia/U-del CC

# CuroCell® AUTO4 CX13

CuroCell® AUTO4 CX13 används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass. Den används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4<sup>(1)</sup>.

CuroCell® AUTO4 CX13 kan användas med växlande tryck eller med konstant lågt tryck. Pumpen är enkel att sköta och hantera. Madrasssystemet reglerar självständigt och utan manuell justering madrassens inre tryck till olika värden baserat på patientens vikt och lägesändring, utöver detta finns möjlighet att göra manuell inställning vid sittande läge.

CuroCell® AUTO4 CX13 har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.



Den levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och god hygienisk standard.

CuroCell® AUTO4 CX13 tillverkas av moderna, återvinningsbara material som uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)(4)</sup>.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.varhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-05-27.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump med automatisk funktion</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Utbytbara luftceller</li><li>• Statisk funktion</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: växeltrycksmadrass</li><li>• Höjd: 13 cm</li><li>• Funktion: förebyggande och som hjälpmedel vid behandling t o m kategori 4<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg</li><li>• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</li><li>• Ljudnivå pump: 27 dBA</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hälfunktion</li><li>• Kraftig transportväska</li><li>• Överdrag med svetsade sömmar</li></ul>	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.