

Bruksanvisning

2021-04-19

Curera Sittdynor

Avser produkterna:

Consil

Consil Kupad

Contur

Contur EX

Plantur

Concept

Concept EX

Concept Latus

Hemi

Tremix

Contur Barn


Överdrag standard

Överdrag Delux

Överdrag Hätta

Hygienöverdrag

Utjämningsplatta

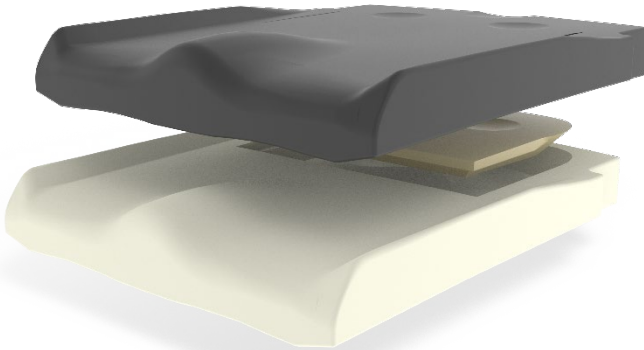

Artikelnummer bruksanvisning: 97-001001



7 331633 114240



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Produktbeskrivning och prestanda	4
Handhavande	13
Rengöring	14
Övrig information	15
Tillbehör	17

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna bruksanvisning eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Om dynan är skyddad med hygienöverdrag, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med dynan. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
3. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
4. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad.
5. Om dynan har utsatts för höga temperaturer, exempelvis förvarats i direkt solsken, skall man före användning kontrollera så att den inte är för varm att sitta på.
6. Kontrollera alltid att dynan har avsedd storlek.
7. Före användning skall dynan alltid kontrolleras så att den inte är skadad.
8. Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet.
9. Långvarigt stillasittande ökar risken för DVT (djup ventrombos).
10. Kontrollera regelbundet huden för rodnad. Om rodnaden uppkommer sluta omedelbart använda dynan, kontakta ordnatören.
11. Dynan är avsedd att användas i rullstol eller stol med rygg och armstöd. Vid användning i rullstol med hängsits finns utjämningsplatta som tillbehör.
12. Dynor skall alltid användas med överdrag.
13. Kontrollera så att överdraget sitter bra på dynan, passformen skall vara god.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna dyna är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

1.2 Avsedd användning

Curera sittdynor är en serie svensktillverkade tryckfördelande och tryckavlastande dynor, designade för stabilitet och god sittkomfort. Dynorna är avsedda för användare med känsel och som kan variera sin sittposition samt har låg risk för trycksår. Desinficering av dynan skall ske mellan varje brukare.

1.3 Övrig information

För bästa möjliga resultat vid användning av denna produkt rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter. Denna information kan hämtas från vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst. Se kontaktuppgifter på sista sidan.

2 Produktbeskrivning och prestanda

Curera sittdynor finns tillgängliga i en rad olika utförande och storlekar. Dynan kan användas i/till alla på marknaden vanligt förekommande rullstolar. För tillgängliga standardstorlekar se pkt 2.2, önskas andra storlekar kontakta Care of Sweden.

För mer information om produkterna, kontakta oss på 0771-106 600, info@careofsweden.se eller besök vår hemsida www.careofsweden.se.

2.1 Förklaring överdrag

Samtliga överdrag är enkla att hantera och sköta och klarar högt ställda krav på rengöring och hygien. För information om rengöring se punkt 4.

Överdrag Standard - Ett avtagbart överdrag i polyesterplysch (100% polyester) med dragkedja på bakkanten. Ett elastiskt och följsamt material på ovasidan som motverkar framåtgående, undersida i antiglid material.

Hygienöverdrag – Ett vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är enkelt att hantera och sköta. Överdraget är elastiskt och följsamt, har antiglid på undersidan och dragkedja på bakkanten.

Överdrag Hätta - Är tillverkat i 2-vägsstretch. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Överdraget har resår runt om och är lätt att ta av och på vid tvätt.

Överdrag Delux - Ett avtagbart överdrag i polyesterplysch på utsidan och ett självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

2.2 Beskrivning produkter

Curera sittdynor kännetecknas av hög komfort och god funktionalitet. De är enkla att rengöra och med rundad bakkant och urtag för rullstolens ryggstödsrör ger de en bra passform. Märkning på dynan gör den enkel att placera rätt.

Consil

En tryckfördelande och anatomiskt formad sittdyna med mönsterskyddad (Reg.nr 81423) design.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Consil, inklusive överdrag Hätta.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg
803535-40	35x35x5 cm	60	804545-40	45x45x5 cm	135
803540-40	35x40x5 cm	60	804550-40	45x50x5 cm	135
803740-40	37x40x5 cm	90	804740-40	47x40x5 cm	135
803745-40	37x45x5 cm	90	804745-40	47x45x5 cm	150
804040-40	40x40x5 cm	90	804750-40	47x50x5 cm	150
804045-40	40x45x5 cm	90	805040-40	50x40x5 cm	150
804050-40	40x50x5 cm	90	805045-40	50x45x5 cm	150
804240-40	42x40x5 cm	125	805050-40	50x50x5 cm	150
804245-40	42x45x5 cm	125	805540-40	55x40x5 cm	160
804250-40	42x50x5 cm	125	805545-40	55x45x5 cm	160
804540-40	45x40x5 cm	135	805550-40	55x50x5 cm	160

Artikelinformation Consil, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg
803535-11	35x35x5 cm	60	804545-11	45x45x5 cm	135
803540-11	35x40x5 cm	60	804550-11	45x50x5 cm	135
803740-11	37x40x5 cm	90	804740-11	47x40x5 cm	135
803745-11	37x45x5 cm	90	804745-11	47x45x5 cm	150
804040-11	40x40x5 cm	90	804750-11	47x50x5 cm	150
804045-11	40x45x5 cm	90	805040-11	50x40x5 cm	150
804050-11	40x50x5 cm	90	805045-11	50x45x5 cm	150
804240-11	42x40x5 cm	125	805050-11	50x50x5 cm	150
804245-11	42x45x5 cm	125	805540-11	55x40x5 cm	160
804250-11	42x50x5 cm	125	805545-11	55x45x5 cm	160
804540-11	45x40x5 cm	135	805550-11	55x50x5 cm	160

Consil Kupad

En tryckfördelande och anatomiskt formad sittdyna. Dynan har en förstärkt bottenplatta med fasning, vilket möjliggör att dynan även går att använda i rullstolar med hängmattesits.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum

Höjd: 7 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Consil Kupad, inklusive överdrag Standard

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg
803535-11K	35x35x5 cm	60	804545-11K	45x45x5 cm	135
803540-11K	35x40x5 cm	60	804550-11K	45x50x5 cm	135
803740-11K	37x40x5 cm	90	804740-11K	47x40x5 cm	135
803745-11K	37x45x5 cm	90	804745-11K	47x45x5 cm	150
804040-11K	40x40x5 cm	90	804750-11K	47x50x5 cm	150
804045-11K	40x45x5 cm	90	805040-11K	50x40x5 cm	150
804050-11K	40x50x5 cm	90	805045-11K	50x45x5 cm	150
804240-11K	42x40x5 cm	125	805050-11K	50x50x5 cm	150
804245-11K	42x45x5 cm	125	805540-11K	55x40x5 cm	160
804250-11K	42x50x5 cm	125	805545-11K	55x45x5 cm	160
804540-11K	45x40x5 cm	135	805550-11K	55x50x5 cm	160

Artikelinformation Consil Kupad, inklusive hygienöverdrag

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg
803535-60K	35x35x5 cm	60	804545-60K	45x45x5 cm	135
803540-60K	35x40x5 cm	60	804550-60K	45x50x5 cm	135
803740-60K	37x40x5 cm	90	804740-60K	47x40x5 cm	135
803745-60K	37x45x5 cm	90	804745-60K	47x45x5 cm	150
804040-60K	40x40x5 cm	90	804750-60K	47x50x5 cm	150
804045-60K	40x45x5 cm	90	805040-60K	50x40x5 cm	150
804050-60K	40x50x5 cm	90	805045-60K	50x45x5 cm	150
804240-60K	42x40x5 cm	125	805050-60K	50x50x5 cm	150
804245-60K	42x45x5 cm	125	805540-60K	55x40x5 cm	160
804250-60K	42x50x5 cm	125	805545-60K	55x45x5 cm	160
804540-60K	45x40x5 cm	135			

Contur

En tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomiskt formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum från undersidan. Dynan är vätsketät.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Contur, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg
513035-11	30x35x5 cm	70	514740-11	47x40x5 cm	135
513535-11	35x35x5 cm	70	514745-11	47x45x5 cm	150
513540-11	35x40x5 cm	70	514750-11	47x50x5 cm	150
513545-11	35x45x5 cm	70	515040-11	50x40x5 cm	150
513740-11	37x40x5 cm	100	515045-11	50x45x5 cm	150
513745-11	37x45x5 cm	100	515050-11	50x50x5 cm	150
513750-11	37x50x5 cm	100	515240-11	52x40x5 cm	150
514040-11	40x40x5 cm	125	515245-11	52x45x5 cm	150
514045-11	40x45x5 cm	125	515250-11	52x50x5 cm	150
514050-11	40x50x5 cm	125	515540-11	55x40x5 cm	160
514240-11	42x40x5 cm	125	515545-11	55x45x5 cm	160
514242-11	42x42x5 cm	125	515550-11	55x50x5 cm	160
514245-11	42x45x5 cm	125	515555-11	55x55x5 cm	160
514250-11	42x50x5 cm	125	515740-11	57x40x5 cm	160
514343-11	43x43x5 cm	125	515745-11	57x45x5 cm	160
514540-11	45x40x5 cm	135	515750-11	57x50x5 cm	160
514545-11	45x45x5 cm	135	516045-11	60x45x5 cm	160
514547-11	45x47x5 cm	135	516050-11	60x50x5 cm	160
514550-11	45x50x5 cm	135	516545-11	65x45x5 cm	160

Contur EX

En tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum från undersidan.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16.

Artikelinformation Contur EX, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max Brukarvikt/Kg
513535-25	35x35x5 cm	70	514540-25	45x40x5 cm	135
513540-25	35x40x5 cm	70	514545-25	45x45x5 cm	135
513740-25	37x40x5 cm	100	514550-25	45x50x5 cm	135
513745-25	37x45x5 cm	100	514740-25	47x40x5 cm	135
514040-25	40x40x5 cm	125	514745-25	47x45x5 cm	150
514045-25	40x45x5 cm	125	514750-25	47x50x5 cm	150
514050-25	40x50x5 cm	125	515040-25	50x40x5 cm	150
514240-25	42x40x5 cm	125	515045-25	50x45x5 cm	150
514245-25	42x45x5 cm	125	515050-25	50x50x5 cm	150
514250-25	42x50x5 cm	125	515550-25	55x50x5 cm	150

Plantur

En tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av formgjuten polyuretanskum med plan ovansida och med inlägg av viskoelastiskt skum i undersidan. Dynan är vätsketät.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Plantur, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr	Storlek (BxDxH)	Rek. max brukarvikt/KG	Artikel nr	Storlek (BxDxH)	Rek. max brukarvikt/KG
523035-20	30x35x5 cm	70	524250-20	42x50x5 cm	125
523535-20	35x35x5 cm	70	524540-20	45x40x5 cm	125
523540-20	35x40x5 cm	70	524545-20	45x45x5 cm	125
523545-20	35x45x5 cm	70	524550-20	45x50x5 cm	125
523740-20	37x40x5 cm	125	524740-20	47x40x5 cm	150
523745-20	37x45x5 cm	125	524745-20	47x45x5 cm	150
523750-20	37x50x5 cm	125	525040-20	50x40x5 cm	150
524040-20	40x40x5 cm	125	525045-20	50x45x5 cm	150
524045-20	40x45x5 cm	125	525050-20	50x50x5 cm	150
524050-20	40x50x5 cm	125	525540-20	55x40x5 cm	160
524750-20	47x50x5 cm	150	525545-20	55x45x5 cm	160
524240-20	42x40x5 cm	125	525550-20	55x50x5 cm	160
524245-20	42x45x5 cm	125			

Consept

En tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovansidan. Dynan är vätsketät.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Consept, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
543535-11	35x35x5 cm	70	544545-11	45x45x5 cm	130
543540-11	35x40x5 cm	70	544550-11	45x50x5 cm	130
543545-11	35x45x5 cm	70	544740-11	47x40x5 cm	130
543740-11	37x40x5 cm	105	544745-11	47x45x5 cm	150
543745-11	37x45x5 cm	105	544750-11	47x50x5 cm	150
544040-11	40x40x5 cm	115	545040-11	50x40x5 cm	150
544045-11	40x45x5 cm	115	545045-11	50x45x5 cm	150
544050-11	40x50x5 cm	115	545050-11	50x50x5 cm	150
544240-11	42x40x5 cm	130	545545-11	55x45x5 cm	160
544245-11	42x45x5 cm	130	545550-11	55x50x5 cm	160
544250-11	42x50x5 cm	130	545745-11	57x45x5 cm	160
544540-11	45x40x5 cm	130			

Concept EX

En tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16.

Artikelinformation Concept EX, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
543535-20	35x35x5 cm	70	544540-20	45x40x5 cm	130
543540-20	35x40x5 cm	70	544545-20	45x45x5 cm	130
543740-20	37x40x5 cm	105	544550-20	45x50x5 cm	130
543745-20	37x45x5 cm	105	544740-20	47x40x5 cm	130
544040-20	40x40x5 cm	115	544745-20	47x45x5 cm	150
544045-20	40x45x5 cm	115	544750-20	47x50x5 cm	150
544050-20	40x50x5 cm	115	545040-20	50x40x5 cm	150
544240-20	42x40x5 cm	130	545045-20	50x45x5 cm	150
544245-20	42x45x5 cm	130	545050-20	50x50x5 cm	150
544250-20	42x50x5 cm	130			

Concept Latus

En tryckfördelande sittdyna avsedd för tunga brukare. Den är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Dynan är vätsketät.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 7 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Concept Latus, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
585045-11	50x45x7 cm	250	585750-11	57x50x7 cm	260
585050-11	50x50x7 cm	250	585755-11	57x55x7 cm	260
585245-11	52x45x7 cm	250	586050-11	60x50x7 cm	260
585250-11	52x50x7 cm	250	586055-11	60x55x7 cm	260
585545-11	55x45x7 cm	250	586550-11	65x50x7 cm	270
585550-11	55x50x7 cm	250	586555-11	65x55x7 cm	270
			587050-11	70x50x7 cm	270
			587055-11	70x55x7 cm	270
			587550-11	75x50x7 cm	270

Hemi

Hemi är en speciellt utformad sittdyna med mönsterskyddad (Reg.nr 79436) design och passar för personer som har behov av att kunna sparka sig fram med rullstolen. Den finns i tre varianter; vänster, höger och dubbel. Dynan är vätsketät.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 5 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Hemi vänster, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
513535-55	35x35x5 cm	70	514545-55	45x45x5 cm	130
513540-55	35x40x5 cm	70	514550-55	45x50x5 cm	130
514040-55	40x40x5 cm	115	515040-55	50x40x5 cm	150
514045-55	40x45x5 cm	115	515045-55	50x45x5 cm	150
514240-55	42x40x5 cm	130	515050-55	50x50x5 cm	150
514245-55	42x45x5 cm	130	516050-55	60x50x5 cm	160
514540-55	45x40x5 cm	130			

Artikelinformation Hemi höger, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
513535-50	35x35x5 cm	70	514545-50	45x45x5 cm	130
513540-50	35x40x5 cm	70	514550-50	45x50x5 cm	130
514040-50	40x40x5 cm	115	515040-50	50x40x5 cm	150
514045-50	40x45x5 cm	115	515045-50	50x45x5 cm	150
514240-50	42x40x5 cm	130	515050-50	50x50x5 cm	150
514245-50	42x45x5 cm	130	516050-50	60x50x5 cm	160
514540-50	45x40x5 cm	130			

Artikelinformation Hemi dubbel, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
513535-60	35x35x5 cm	70	514545-60	45x45x5 cm	130
513540-60	35x40x5 cm	70	514550-60	45x50x5 cm	130
514040-60	40x40x5 cm	115	515040-60	50x40x5 cm	150
514045-60	40x45x5 cm	115	515045-60	50x45x5 cm	150
514240-60	42x40x5 cm	130	515050-60	50x50x5 cm	150
514245-60	42x45x5 cm	130	516050-60	60x50x5 cm	160
514540-60	45x40x5 cm	130			

Tremix

En anatomiskt utformad sittdyna uppbyggd i flera skikt och som används för att förebygga trycksår. Dynan är vätsketät.

Klassificering: ISO-kod 04 33 03 - Tryckavlastande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 7 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Tremix, inklusive överdrag Delux.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
563535-11	35x35x7 cm	70	564740-11	47x40x7 cm	130
563540-11	35x40x7 cm	70	564745-11	47x45x7 cm	150
563740-11	37x40x7 cm	105	564750-11	47x50x7 cm	150
563745-11	37x45x7 cm	105	565040-11	50x40x7 cm	150
564040-11	40x40x7 cm	115	565045-11	50x45x7 cm	150
564045-11	40x45x7 cm	115	565050-11	50x50x7 cm	150
564050-11	40x50x7 cm	115	565240-11	52x40x7 cm	150
564240-11	42x40x7 cm	130	565245-11	52x45x7 cm	150
564245-11	42x45x7 cm	130	565250-11	52x50x7 cm	150
564250-11	42x50x7 cm	130	565540-11	55x40x7 cm	160
564540-11	45x40x7 cm	130	565545-11	55x45x7 cm	160
564545-11	45x45x7 cm	130	565550-11	55x50x7 cm	160
564550-11	45x50x7 cm	130			

Contur Barn

En tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan.

Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande

Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi

Höjd: 4 cm

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Artikelinformation Contur Barn, inklusive överdrag Standard.

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Rek. Max brukarvikt/KG
512525-12	25x25x4 cm	40	513035-12	30x35x4 cm	60
512530-12	25x30x4 cm	40	513335-12	33x35x4 cm	60
512725-12	27x25x4 cm	60	513535-12	35x35x4 cm	60
512730-12	27x30x4 cm	60	513540-12	35x40x4 cm	60
513030-12	30x30x4 cm	60	514040-12	40x40x4 cm	60
513034-12	30x34x4 cm	60			

Utjämningsplatta (Tillbehör)

Det finns 2 varianter av utjämningsplattor, den ena placeras inuti överdraget under dynan, med den rundade bakkanten bakåt och den fasade undersidan vänd ned mot överdragets undersida. Den andra placeras under rullstolsdynan för att fylla ut mellanrummet mellan dynan och hängmattesitsen, undersidan är försedd med ett antiglidmaterial. Kan användas till samtliga dynor utom till Tremix som redan har denna funktion.

Material: Cellpolyeten

Garanti: 2 år

Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

Max brukarvikt: 270 kg

Artikelinformation Utjämningsplatta (utan antiglid).

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)
583535-30	35x35x2,5 cm	584540-30	45x40x2,5 cm	584750-30	47x50x2,5 cm
584040-30	40x40x2,5 cm	584545-30	45x45x2,5 cm	585045-30	50x45x2,5 cm
584045-30	40x45x2,5 cm	584550-30	45x50x2,5 cm	585050-30	50x50x2,5 cm
584240-30	42x40x2,5 cm	584740-30	47x40x2,5 cm	585550-30	55x50x2,5 cm
584245-30	42x45x2,5 cm	584745-30	47x45x2,5 cm	585555-30	55x55x2,5 cm

Artikelinformation Utjämningsplatta (med antiglid).

Artikel nr.	Storlek (BxDxH)	Artikel nr.	Storlek (BxDxH)
583040-20	30x40x2,5 cm	584545-20	45x45x2,5 cm
583540-20	35x40x2,5 cm	584550-20	45x50x2,5 cm
584040-20	40x40x2,5 cm	584750-20	47x50x2,5 cm
584045-20	40x45x2,5 cm	585045-20	50x45x2,5 cm
584540-20	45x40x2,5 cm	585050-20	50x50x2,5 cm
		585550-20	55x50x2,5 cm

Andra storlekar?

Kontakta Care of Sweden vid behov av andra storlekar än vad som finns angivna här.

3 Handhavande

Vid upppackning kontrollera så att godset inte är skadat. Avlägsna plastpåsen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas på grund av risk för skador på produkten.

Dynor

1. Kontrollera att dynan ligger rätt i överdraget. Följ märkning på överdrag och dyna.
2. Placera dynan enligt märkning på dynan i rullstolen eller stolen. Kontrollera att dynans storlek är rätt för stolens sits.
3. Brukaren kan börja använda dynan.

Notera! Om dynan Tremix har förvarats i temperatur under +10 °C skall den förvaras i rumstemperatur minst 1 timme innan den tas i bruk.

Utjämningsplatta (utan antiglid)

Placera plattan inuti överdraget, under dynan, med den rundade bakkanten bakåt och den fasade undersidan vänd ned mot överdragets undersida. Plattan är även märkt med hur den skall placeras.



Utjämningsplatta (med antiglid)

Placera plattan under rullstolsdynan med antiglidmaterialet vänt neråt.



Utjämningsplatta (Tillbehör)



Punktrensning med mild rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Den skall vara helt torr innan den tas i bruk igen.

5 Övrig information

5.1 Förvaring

Förvara dynan plant med överdraget på. Förvaring bör ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara dynan så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller annan mekanisk påverkan. Undvik att utsätta dynan för direkt solljus.

5.2 Märkning

Dynan är märkt med tillverkningsdatum, ordernummer, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer. Den är även märkt hur den skall placeras i stolen.

5.3 Garanti

Garantitiden för respektive produkt anges under pkt 2.2.

Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten. Ej heller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering och skötsel.

5.4 Service och underhåll

Dynan kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

5.5 Livslängd

Dynans förväntade livslängd är 2 år.

5.6 Demontering och källsortering

Dynan är helt återvinningsbar och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

5.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

5.8 Symbolförklaring



Artikelnummer

XXXX-XX-XX

År-Månad-dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Rekommenderad
brukarvikt



Avtorkning



Maskintvätt 95 °C



Klor



Torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Tillverkare

6 Tillbehör

Till dessa dynor finns ett urval av tillbehör. Här nedan listas dessa.

Utjämningsplatta

Vid behov av att utjämna sittytan finns en skiva som placeras i överdraget, mot dynans undersida. Se sid 12-13 för mer information.

Överdrag

Hygienöverdrag (Consil)	80xxyy-01*
Hygienöverdrag (Contur)	50xxyy-04*
Hygienöverdrag (Contur EX)	50xxyy-10*
Hygienöverdrag (Consept/Consept EX)	54xxyy-02*
Överdrag Hätta (Consil)	80xxyy-00*
Överdrag Standard (Consil)	80xxyy-02*
Överdrag Standard (Consil Kupad)	80xxyy-02*
Överdrag Standard (Contur)	50xxyy-00*
Överdrag Standard (Contur EX)	50xxyy-06*
Överdrag Standard (Plantur)	53xxyy-00*
Överdrag Standard (Contur Barn)	50xxyy-01*
Överdrag Standard (Consept/Consept EX)	54xxyy-00*
Överdrag Standard (Consept Latus)	58xxyy-00*
Överdrag Standard (Hemi vänster)	50xxyy-55*
Överdrag Standard (Hemi höger)	50xxyy-50*
Överdrag Standard (Hemi dubbel)	50xxyy-60*
Överdrag Delux (Tremix)	56xxyy-00*

*xxyy i artikelnumren betecknar storleken på produkten. Till exempel 804045-00 betecknar ett överdrag Hätta till Consil i storleken 40x40x5 cm (xx= bredd, yy=djup).

Vid behov av andra tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden på 0771-106 600 eller gå in på vår hemsida – www.careofsweden.se.



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00):**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo