

Bruksanvisning

2018-11-15

Optimal Kuddskydd & Hygientopp

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001108



VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Får ej användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. Var särskilt uppmärksam där sänggrindar används. Undvik skador från vassa föremål som kan påverka hygienskyddets funktion.
4. Hygientoppen är vätske- och lufttät men ångpermeabelt. Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
5. Undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med produkterna. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

Allmän information

Denna produkt är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

Produktbeskrivning Kuddskydd

Avtagbart kuddskydd tillverkat av polyuretanbelagd polyesterväv. Ett elastiskt, följsamt material som är vätsketätt men ångpermeabelt. Uppfyller tillämpliga delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

Avsedd användning Kuddskydd

Avtagbara hygienskydd med mycket god hygienisk standard. Finns i storlekarna 35x45, 50x60 och 50x70 cm.

Produktbeskrivning Hygientopp

Optimal Hygientopp är ett enkelt, slitstarkt och funktionellt madrassskydd med bra passform och följsamhet. Hygientoppen finns i flera olika storlekar. Passar både till resårkärnan, standardmadrassen och bäddmadrassen. Enkel att ta med på resa. Tillverkat i polyuretanbelagd polyesterväv, ett material som är mjukt och elastiskt. Hygientoppen är helt vätsketät men ångpermeabelt vilket minskar risken för hudmaceration. Uppfyller tillämpliga

delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, SS-EN ISO 12952, EN 14126.

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter. Denna information kan hämtas från vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst. Se kontaktuppgifter på sista sidan.

Rengöring och rekonditionering


Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet. Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut.

Instruktioner



Torka av med milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande.

Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.

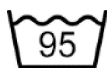

Överdraget kan maskintvättas i max 95 °C, torktumlas alternativt dropptorkas.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

Förvaring

Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme.

Märkning

Märkta med produktnamn, tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer. Även ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn).

Tillval Kuddskydd

Svetsade sömmar

Dragkedja i plast

Garanti

Denna produkt omfattas av ett (1) års garanti. Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

Service och underhåll

Produkten kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

Livslängd

Beräknad livslängd för dessa produkter är 2 år.

Lagning

För instruktioner kontakta Care of Sweden, telefon 0771-106 600.

Demontering och källsortering

Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Retur av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Maskintvätt 95 °C



Klor



Torktumling



Dropptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning



Tillverkare/Manufactured by

 **care of sweden**
SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

Postadress:

Care of Sweden AB

Box 146

514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgratan 5A

514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A

514 33 Tranemo

Akuta ärenden, efter kontorstid (vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)

Telefon: 0325-101 11