

# Curera® Bålstöds kudde

Kudde för bålstöd i sittande läge

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för trycksår.

## Exempel på positionering

Curera® Bålstöds kudde kan användas som bålstöd i sittande position. Kudden kan placeras bakom individen för stöd vid sittande position på sängkanten. Bålstödskudden kan även placeras framför individen, med fördel i kombination med en Curera® Böjd kudde placerad bakom ryggen.

Curera® Bålstöds kudde kan fungera som stöd vid halvt sittande position i sängen eller för individer sittande på en stol eller i rullstol.



## Överdrag för komfort och hygien

Curera® positioneringskuddar har ett fast ytterhölje i blå bomull. Positioneringskuddarna finns tillgängliga med ett bomullsöverdrag för extra komfort, eller ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch<sup>(2)(3)</sup> för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt<sup>(4)</sup> för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.



## Teknisk specifikation

Fyllning	50 % HR skum, 50 % polyesterfiber.
Storlek	85x65x30 cm
Tillgängliga överdrag	Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester) Bomullsöverdrag
Instruktion för rengöring	Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C. Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger. Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

## Referenser

- (1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
- (2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-08.