

Curera[®] Ekerskydd

Passar på flertalet rullstolsmodeller



Curera® Ekerskydd

Ekerskyddet är tillverkat av slagtålig, flexibel och transparent plast med centrumhål 80 mm alt. 120 mm. De passar på de flesta rullstolsmodeller, även till modeller som har hjul med vårdarbromsar.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-12-11.

MONTERING	FAKTA
Rengör ekrarna på rullstolens hjul och kontrollera att hjulet är i gott skick. Placera sedan ekerskyddet på hjulets utsida. Se till att ekerskyddet ligger mot ekrarna. Fäst ekerskyddet med buntband i de förborrade hålen. Ekerskyddet ska spännas med fyra fästpunkter. Infästningsmaterial ingår ej i leveransen. Innan användning kontrollera att ekerskyddet stämmer överens med rullstolens hjul. Vid en eventuell anpassning är det ordnatörens ansvar att säkerställa så att inga vassa kanter finns kvar som kan skada brukare eller personal.	• Material: Polyester • Emballage: 0,5 % PELD 04 • Allmän rengöring: Ekerskydden kan torkas av med ett milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten.