

Curera® S-kudde

Kudde för halvt sidoläge & 30° sidoläge

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen⁽¹⁾, vilket minskar risken för trycksår.

Exempel på positionering

Curera® S-kudde används till att skapa en 30° position för tryckavlastning. Placera kuddens övre del bakom individens rygg och den nedre delen mellan knän och underbenen.

Curera® S-kudde kan även användas till framstupa sidoläge genom att kuddens övre del placeras framför och under överarmen, kuddens mellersta del under det böjda låret och den nedersta delen placeras under underbenen och fot.



Överdrag för komfort och hygien

Curera® positioneringskuddar har ett fast ytterhölje i blå bomull. Positioneringskuddarna finns tillgängliga med ett bomullsöverdrag för extra komfort, eller ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽²⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽⁴⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.



Teknisk specifikation

Fyllning	50 % HR skum, 50 % polyesterfiber
Storlekar	38x200 cm och 28x170 cm
Tillgängliga överdrag	Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester) Bomullsöverdrag
Instruktion för rengöring	Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C. Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger. Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.
CE-märkning	Registered and marked in accordance with MDR (EU) 2017/745

Referenser

- (1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
- (2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-08.