

# Liljenberg 3-delad madrass



Mjukfibermadrass

# Liljenberg 3-delad madrass

Madrassen består av tre mjukfiberdelar som ligger i ett madrassfodral med fickor. Detta gör att man kan flytta delarna i madrassen för en jämnare belastning samt att man kan rengöra varje del var för sig. Går även att använda i en vanlig hushållstvättmaskin.

Utsatta kroppsdelar avlastas och de glatta fibrerna motverkar skjuvning.

## Fakta

---

Vikt: 4.3 kg

Färg: Benvit

Brand: SS 876 00 01

Garanti: 2 år

Tvättanvisning: Normalfall - tvätta i 60 °C. Vid infektionsrisk/hård nedsmutsning - tvätta i 70 °C, minst 10 min. Torktumlas i normal temperatur.



## Hantering

Liljenberg 3-delad madrass läggs på en vanlig madrass och fästs på underliggande madrass med resårbanden i hörnen. Bädda med lakan, samt vid behov, inkontinensskydd eller hygienunderlägg. För att undvika ökad belastning mot huden, använd så få lager som möjligt mellan brukare och madrass.

## Storlekar

---

80/90/105/120x200 cm.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-07-08.