

Molly Hälavlastare

Avlastning för hälar

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen⁽¹⁾, vilket minskar risken för trycksår.

Exempel på positionering

Vid ryggläge

Molly Hälavlastare kan användas för att avlasta hälarna. Använd alltid en strumpa eller tubgas mellan huden och Molly Hälavlastare. Säkerställ att öppningen för kardborrebanden är vänd uppåt.



Vid sidoläge

Rotera Molly Hälavlastare så att öppningen för kardborrebanden är vänd ner mot madrassen. Hälavlastaren ska sitta löst nog för att kunna roteras runt benet.



Överdrag för komfort och hygien

Molly Hälavlastare levereras med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽²⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽⁴⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.



Teknisk specifikation

Fyllning	100% viscoelastiskt skum
Storlek	Small, Medium, Large
Tillgängliga överdrag	Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester)
Instruktion för rengöring	Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

Referenser

- (1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
- (2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-10.