

Bruksanvisning

2019-01-16

Liljenberg mjukfibermadrasser

Avser produkterna:

Liljenbergmadrassen

Liljenberg 3-delad madrass

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001312



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Introduktion	3
Produktbeskrivning och prestanda	4
Uppackning av madrassen	5
Rengöring	5
Övrig information	6
Tillbehör	7

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

WARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används.
4. Kontrollera alltid att madrassen har avsedd storlek.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna madrass är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden.

1.2 Beskrivning/Avsedd användning

Liljenberg mjukfibermadrasser används för brukare som behöver en mjuk och ventilerande madrass. De glatta silikoniserade hålfibrerna motverkar skjuvning, denna sker i madrassen istället för i brukarens egen vävnad. Den är även mycket uppskattad vid värk och smärttillstånd.

Vi rekommenderar att lägesändringar utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal, beroende på brukarens status, diagnos och allmäntillstånd.

1.3 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madrassguiden

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. Liljenberg mjukfibermadrasser är madrasser i funktionsgrupp A. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

2 Produktbeskrivning och prestanda

Madrasserna finns tillgängliga i följande storlekar: 80x200 cm, 90x200 cm, 105x200 och 120x200 cm. Önskas andra storlekar, kontakta Care of Sweden.

För mer information om produkterna kontakta oss på 0771-106 600, info@careofsweden.se eller besök vår hemsida www.careofsweden.se.

2.1 Beskrivning produkt

Liljenberg mjukfibermadrasser är bäddmadrasser som placeras ovanpå en befintlig madrass. Madrassen fästs mot den underliggande madrassen med resårbanden på hörnen, Liljenbergmadrassen har även bäddflikar på sidorna som viks in under madrassen.

Bädda med ett lakan, hygienunderlägg eller inkontinensskydd vid behov. För att undvika ökad belastning mot huden, använd så få lager som möjligt mellan brukare och madrass.

2.1.1 Liljenbergmadrassen

Mjukfibermadrass i ett stycke.

Material fyllning	Polyester, silikoniserad hålfiber
Vikt	3.2 kg (90 cm bredd)
Rekommenderad brukarvikt	0-75 kg
Garanti	2 år
Beräknad livslängd	2 år
Brand	SS 876 00 01
Tillgängliga storlekar/art.nr	80x200 cm, art.nr LB001-080200 90x200 cm, art.nr LB001-090200 105x200 cm, art.nr LB001-105200 120x200 cm, art.nr LB001-120200

2.1.2 Liljenberg 3-delad madrass

Mjukfibermadrass som består av tre madrassdelar som ligger i ett madrassfodral med fickor.

Material fyllning	Polyester, silikoniserad hålfiber
Vikt	4,3 kg (90 cm bredd)
Rekommenderad brukarvikt	0-100 kg
Garanti	2 år
Beräknad livslängd	2 år
Brand	SS 876 00 01
Tillgängliga storlekar/art.nr	80x200 cm, art.nr LB010-080200 90x200 cm, art.nr LB010-090200 105x200 cm, art.nr LB010-105200 120x200 cm, art.nr LB010-120200

3 Uppackning av madrassen

Madrasser levereras komprimerade i återvinningsbar plast. Komprimeringen är till för att ni som kund skall få ett paket som är lättare att hantera och för att vi skall minska vår påverkan på miljön genom att minska på transportvolymen.

1. Börja med att kontrollera så att inte godset är skadat. Avlägsna plastpåsen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas på grund av risk för skador på madrassen.
2. Madrassen bör helst ligga upppackad (i plant läge) i cirka två timmar innan den tas i bruk. Dock kan madrassen användas omgående om behov föreligger. Det kan ta upp till några dagar innan madrassen återtagit sin fulla bredd/längd/höjd efter transportkomprimeringen.

4 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

Normal rengöring



Vid torktumling ta ut madrassen när den är ”stryktorr”.

Vid infektionsrisk



Tvätta i 70 °C, minst 10 min.

5 Övrig information

5.1 Förvaring

Förvara madrassen plant eller varsamt hoprullad. Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara madrassen så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller annan mekanisk påverkan. Undvik att utsätta madrassen för direkt solljus.

5.2 Märkning

Madrasser är märkta med produktnamn, tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer.



5.3 Garanti

Denna produkt har 2 års garanti. Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

5.4 Service och underhåll

Madrassen kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

5.5 Demontering och källsortering

Alla bäddprodukter är helt återvinningsbara och skall sorteras som "brännbart avfall". Ingen demontering är nödvändig.

5.6 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

5.7 Förklaring Symboler



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



Funktionsgrupp



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC




Återvinning



Rekommenderad
brukarvikt



Placeras ovanpå
befintlig madrass

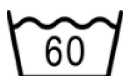

Maskintvätt 60 °C



Maskintvätt 70 °C



Torktumling



Droptorkning



Ej kemtvätt

6 Tillbehör

6.1 Tillbehör

Optimal Hygientopp

Används som skydd över madrassen vilket gör att madrassen inte behöver tvättas/rengöras lika ofta, ger bättre funktion och livslängd till madrassen.

Art.nr	Storlek
20-080205	80x200/205 cm
20-085200	85x200 cm
20-090200	90x200 cm
20-105200	105x200 cm
20-120200	120x200 cm

Väska

Kraftig förvaring och transportväska, art.nr 58-900909.

6.2 Övriga tillbehör

Optimal Hygienkudde

Optimal Hygienkudde är utvecklad för sjukvården med goda komfort- och tvättegenskaper. Levereras med avtagbart hygienskydd. Följande storlekar finns tillgängliga: 35x45, 50x60 och 50x70 cm.

Optimal Sens

En anatomiskt formad sovkudde som ger ett bra stöd för din nacke. Tillverkad av trögsaum och levereras med ett avtagbart hygienöverdrag.

Curera® Stödkil

Ett hjälpmedel för positionering och lägesändring. Stödkilen är lätt att använda och försedd med ett avtagbart hygienöverdrag som är vätsketätt och ångpermeabelt.

Molly Hälavlastare

Ett hjälpmedel framtaget för hälavlastning. Molly ger god komfort vid avlastning av häl. Brukaren kan fritt röra benet och göra lägesändringar. Levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som är vätsketätt och ångpermeabelt. Molly finns i storlekarna Small, Medium och Large.

Curera® Positioneringskuddar

Curera® Positionering är en serie kuddar och kilar som används för att avlasta, positionera och stabilisera brukare i alla typer av vårdmiljöer. Genom att lägesändra och positionera kroppen med stabila kuddar främjas cirkulationen och komforten ökar.

Vid behov av andra tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden eller gå in på vår hemsida – www.careofsweden.se.



Tillverkare/Manufactured by



care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo