

Så säkerställer vi att varje madrass är hygieniskt säker – varje gång

Vår rekonditioneringsprocess i tre steg

1. Visuell och teknisk inspektion

- Madrassen packas upp och kontrolleras noggrant av våra tekniker. Väskan läggs undan för tvätt.
- Alla komponenter inspekteras: madrass, kontrollenhet, överdrag och elsladd + adaptrar.
- Vi säkerställer att inga skador eller luktavvikelser finns.
- Hygienöverdrag bedöms individuellt i motljus för att identifiera skador eller slitage.

2. Rengöring och desinfektion

- Madrasssystemet plockas isär (cellpaket, inneröverdrag, underdel och toppdel) och samtliga delar märks upp för spårbarhet.
- Alla textilier tvättas i 60 °C enligt våra hygienstandarder.
- Delarna rengörs och ytdesinficeras enligt instruktioner i bruksanvisningen.
- Skadade eller slitna delar sorteras ut och byts vid behov.

3. Återmontering och slutkontroll

- När alla delar är torra monteras systemet med eventuella nya reservdelar, såsom hygienöverdrag eller luftceller etc.
- En slutkontroll genomförs för att säkerställa funktion och hygienisk säkerhet. Allt dokumenteras för full spårbarhet.
- Madrassen är nu redo att skickas ut – trygg och säker att använda.

Kontroller och kvalitetssäkring

Vi skickar regelbundet prover för oberoende laboratorieanalys. Madrasser väljs slumpmässigt ut vid retur före rengöring, samt efter rekonditionering, för att analysera förekomst av virus, bakterier, svamp och sporer. Vi följer och anpassar kontinuerligt våra rutiner efter aktuella riktlinjer för svensk vårdhygien, för att säkerställa att våra madrasser uppfyller högsta krav på patientsäkerhet och infektionskontroll.

Rekonditioneringsarbetet utförs i enlighet med certifierade kvalitets- och miljöledningssystem – ISO 13485 (medicinteknik) och ISO 14001 (miljö). Det innebär att vi följer dokumenterade rutiner med full spårbarhet och kvalitetskontroll enligt medicintekniska krav. Vårt arbetssätt utvecklas löpande i linje med standarder för hållbar och ansvarsfull hantering.