

Curera® Trekantskudde

Kudde för underbensstöd

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen⁽¹⁾, vilket minskar risken för trycksår.

Exempel på positionering

Curera® Trekantskudde kan användas för att minska risken för skjuvkrafter i sittande position genom att placera kudden under knäna, samt som stöd vid viloläge i liggande position.

Curera® Trekantskudde kan också användas som ryggstöds kudde.

Överdrag för komfort och hygien

Curera® positioneringskuddar har ett fast ytterhölje i blå bomull. Positioneringskuddarna finns tillgängliga med ett bomullsöverdrag för extra komfort, eller ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽²⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽⁴⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.



Teknisk specifikation	
Fyllning	50 % HR skum, 50 % polyesterfiber
Storlekar	47×28×28 cm, 62×35×35 cm
Tillgängliga överdrag	Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester) Bomullsöverdrag
Instruktion för rengöring	Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C. Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger. Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.
CE-märkning	Registered and marked in accordance with MDR (EU) 2017/745

Referenser

- (1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
- (2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. All rights reserved. Last update: 2026-01-19.

