


Packningsrutin vid retur



1. Töm madrassen på luft genom att trycka på Pack & Go® symbolen i två sekunder. Knappen lyser under tömning och avger en ljudsignal när den är klar. (ca 20 min)

2. När tömningen är klar dra ur CPR:en ur kontrollenheten och stäng den.

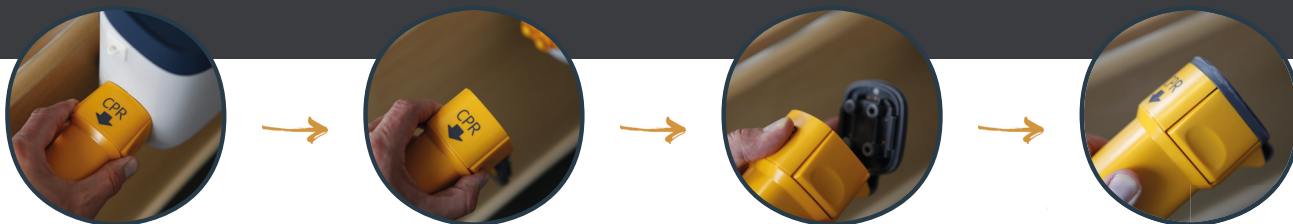

3. Vik upp ändarna mot mitten och vik den ytterligare en gång.



4. Placera pumpen varsamt i mitten av madrassen. Detta är **VIKTIGT** för att undvika skador under transporten.



5. Vik ytterligare en gång på mitten.



6. Lägg ner madrassen i väskan.

OBS!! se till att pumpen är placerad i madrassens vikning som skydd för att undvika skador under transporten.

